

TUMLE


flytkuddar



Positionering i våt miljö

TUMLE flytkuddar används som flythjälp och positionering för personer med funktionsnedsättning vid olika former av vattenterapi. Kuddarna ger brukaren en trygg och avslappnad position i vattnet. Den stora flytkraften som ger näst intill obegränsade möjligheter till individuell anpassning bidrar till den positiva upplevelsen för brukaren. Känslan av säkerhet är inte bara en känsla. Tillsammans med assistent är risken för att glida ur kuddarna mycket liten. På armlängds avstånd utan påträngande kroppskontakt, kan assistent, sjukgymnast eller arbetsterapeut övervaka och hjälpa brukaren.

URIFORM AB

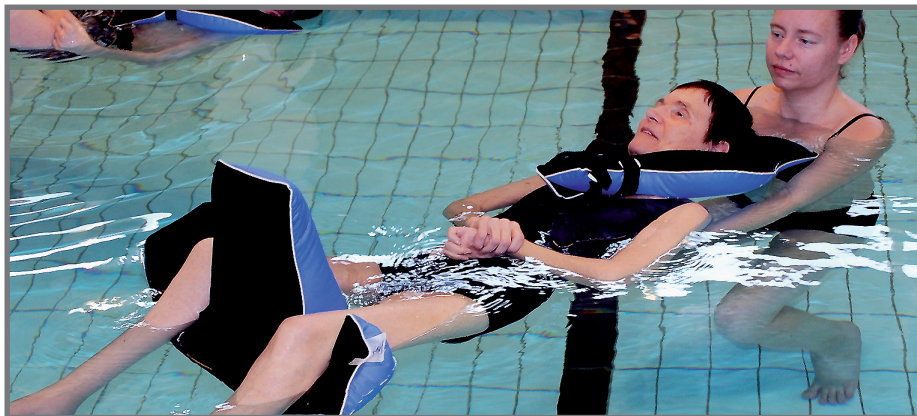

TUMLE flytkuddar finns i fem olika modeller i olika storlek och passar både barn och vuxna. De olika modellerna kombineras lätt individuellt till var brukares behov, och olika kombinationer kan löpande provas under badpasset.

TUMLE flytkuddar tar ingen skada av klorerat bassängvatten. Kudden vattenfylls efter en tid. Fyllnadsmaterialet absorberar dock en obetydlig mängd vatten som inte påverkar flytkraften. Kuddvaret är tillverkat i polyesterväv och nät som är mycket mjukt och följtsamt.

Användning i sjö- eller havsvatten rekommenderas ej då föroreningar i vattnet kan förosaka mögel i kudden.

Efter badet spolas kudden av med oklorerat friskt vatten och lämnas så att vattnet kan rinna ur. Kudden behöver tid för att torka helt, varför det inte är praktiskt möjligt att använda TUMLE flytkuddar i annan "torr miljö".

I hygiensituationer är kuddarna mycket användbara i hygienstol och duschsbits. Efter sådan användning är det viktigt att skölja bort rester av shampo, hår och hudrester och sedan torka kudden i torkskåp vid max 40°.

Produktinformation

Fyllnadsmaterial: polystyrenkuler
Kuddvar: 100% polyester tyg och 100% polyester nät.
Fästband med Velcro kardborrelås

Skötselråd

Spola av kudden med rent oklorerat vatten efter badning och låt dropptorka luftigt utan att stapla kuddar på varandra. Torkning i torkskåp vid max 40°.

URIFORM AB



URIFORM AB, Timmermansgatan 38, 118 55 Stockholm
Tel: 08-6402955, Fax 08-6402957, e-post: butiken@uriform.se
www.uriform.se