

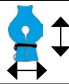
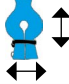
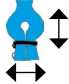
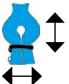


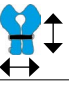



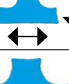

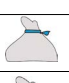


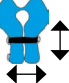

# Produktguide

## TUMLE flytkuddar

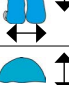2015

modell	produktnamn	cm ↑	cm ↔	art nr	beskrivning
	halsflytkrage XS	50	26	9402	Halsflytkragen är formad som en ring som kan slutas tätt runt halsen. Den används för personer som flyter på rygg. Under bakhuvudet är en fyrkantig platta formad som ger extra flytkraft och stöd för att motverka att huvudet pressas under vattenytan. Från hakan ned över bröstkorgen löper två parallella flytkuddar. De hålls samman strax under hakan av ett band med kardborrlåsning via en D-ring. Ett nedre band löper bakom ryggen från sida till sida på kudden som lyfter bröstkorgen i vattenytan. Halsflytkragen finns i fyra storlekar. <b>Halsflytkragen är ingen flytväst / räddningsväst.</b>
	halsflytkrage S	55	30	9403	
	halsflytkrage M	60	37	9404	
	halsflytkrage L	65	42	9405	
	kort halsflytkrage XS	40	26	9502	Samma som halsflytkrage 9421 men utan den stora plattan bakom bakhuvudet. Nacken kan därför föras längre bakåt och halsen sträckas ut, vilket för vissa brukare underlättar andningen. Stabiliteten i sidled lika som för 9421 men huvudet flyter mer horisontellt. <b>Kort Halsflytkrage är ingen flytväst / räddningsväst.</b>
	kort halsflytkrage S	45	30	9503	
	kort halsflytkrage M	50	37	9504	
	kort halsflytkrage L	55	42	9505	
	liten flythalvmåne	21	47	9601	Liten Flythalvmåne används i hygiensituation. Ett litet, stabilt bälstöd längs med bälen i hygienstolen eller huvudstöd på duschbräns.
	nackflytkudde	37	56	9602	Nackflytkudden är formad för att ligga stadigt i nacken vid ryggsim. Kudden passar dock bra överallt där extra flytkraft saknas, t.ex. under svanken i ryggåläge, under magen i bröstläge, under en överarm, under ett ben eller en fot. Nackflytkudden finns i en storlek.
	bananflytkudde S	50	90	9603	Bananformade flytkuddar har mycket stor flytkraft. De två större kuddarna kan med svårighet sänkas under vattenytan med två vuxna personers belastning. Kuddarna placeras som stöd runt brukaren vid olika positioner i bassängen. Vid ryggsim placeras kudden under huvud, skuldror och armar. Underarmarna tillåts falla utanför kudden som på så sätt hålls på plats. Vid magsim ligger brukaren med huvud och skuldror vilande på kudden. Armarna placeras framåt över kudden och kuddens båda "ben" följer kroppen mot midjan. Vid stå- eller gåövning placeras kudden under brukarens armhålor som en badring. Tippas huvudet framåt tar kudden emot och munnen hålls utan svårighet ovanför vattenytan.
	bananflytkudde M	62	110	9604	
	bananflytkudde L	76	125	9605	
	T-flytkudde S	38	60	9703	T-formade flytkuddar används som flythjälp i knäveckan där kudden håller samman benen men sårar knäna vid spasticitet. T-kudden passar också bra som stöd under smälben och fötter. Placeras T-kudden under hakan och övre delen av bröstkorgen vid magläge, kan huvudet vila över vattenytan. Kudden räcker ut till armhålan och ger stöd under överarmarna som kan riktas framåt.
	T-flytkudde L	50	78	9704	
	tvättpåse S			9802	Tvätt i tvättpåse vid maximalt 60 grader med vanligt förekommande tvättmedel för hushållet. Sköljmedel får inte användas. Efter tvätt rekommenderas torktumling vid låg värme under längre tid alternativt torkskåp vid maximalt 60 grader. Kuddar med torrsvikt över 1 kg rekommenderas inte tvätt i vanlig hushållstvättmaskin då kuddarnas höga vikt vattenfyllda kan skada maskinen under inledande centrifugering. <b>WARNING! Temperatur över 71 grader skadar kuddens fyllning.</b>
	tvättpåse M			9803	
	tvättpåse L			9804	

Rätt till produktförändringar utan föregående avisering förbehålles.  
© URIF-FORM AB 2015-1

URIFORM

URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck  
Tel: 08-7029774 Fax 08-6402957, e-post:order@uriform.se  
www.tumle.uriform.se