

HS Säng

Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077

Bruksanvisning (Sv)
Rev. 1.1



Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform.se

HS säng



Bruksanvisning

1.	Generellt	3
1.1.	Användningsområde	3
1.2.	Standarder & klassifisering	4
2.	Produktöversikt	5
3.	Användning av HC säng..	6
3.1.	Öppning av sida.....	6
3.2.	Stängning av sida.....	7
3.3.	Användning av gavel – Gäller säng med art nr H1047, H1076, H1077	7
3.3.1.	Öppning av huvud- och/eller fotgavel	7
3.4.	Borttagning av polstring	7
3.5.	Montering av polstring.....	7
3.6.	Användning av bromsar.....	8
3.6.1.	Placering	8
3.7.	Användning av handkontroll.....	8
4.	Nödsänkning av sängbottens delar	9
4.1.	Nödsänkning steg för steg	9
5.	Rengöring av HC säng.....	11
5.1.	Daglig rengöring	11
5.2.	Rengöring av madrass/polstring	11
6.	Felsökning av elektronik	12
7.	Avfallshantering	12

HS säng



Bruksanvisning

Du har valt en **HS Säng** från URIFORM AB.

Läs hela bruksanvisningen för största möjliga glädje av din HS säng. Förvara bruksanvisningen på en plats som är tillgänglig för alla personer som använder produkten. Bruksanvisningen finns också att ladda ner på vår hemsida **www.tumle.uriform.se**.

Var uppmärksam på att det kan förekomma avsnitt i denna bruksanvisning som inte är relevant för er produkt.

All hänvisning till höger och vänster ska uppfattas som om att man ligger på rygg i sängen.

Symboler

	Denna ikon markerar villkor och information som ska läsas för att försäkra korrekt och säker användning av produkten.
--	---

1. Generellt


1.1. Användningsområde

HS Sängen är utvecklad till personer över 12 år med diagnosen Huntintons sjukdom eller liknande problem, där det finns behov för polstrade sängdelar för att personen skall försäkras om en trygg och lugnare sömn.

HS Sängen är till för vård antingen i hemmet eller på vårdboende.

Med hjälp av ett unikt ryggstödssystem försäkras att personen får god liggkomfort och ideala villkor för enklare förflyttningar för vårdare.

Max. patientvikt: 163 kg, förutsatt att vikten av madrass och tillbehör inte överstiger 35 kg.

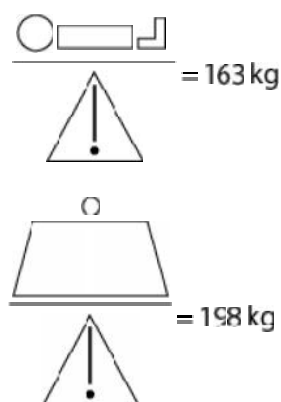

Max. last 198 kg

	HS Sängen ska utrustas med en madrass på max 13 cm.
--	---



1.2. Standarder och klassificering

HS Sängen:

- är CE-märkt enligt Direktiv om medicintekniska produkter 93/42/EEG
- har elektronik som är testad och godkänd enligt EN 60601-1 och EN 60601-1-2 av UL Demko.
- har genomgått riskanalys enligt DS/EN 60601-2-52:2009
- är klassificerad 18 12 10 37 enligt ISO 9999:2011

	Lämna alltid sängen i lägsta position när person ligger i sängen – detta för att minska skaderisken vid eventuellt fall ur sängen eller vid annan händelse. Se till att ingen person befinner sig under sängen när den höjjusteras – detta kan ge allvarliga skador.
	URIFORM påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än angivet i denna bruksanvisning.

Vid i- och urstigning från sängen kan höjdställningsknappen på manöverdosan med fördel användas som hjälp. Dessutom kan ryggstödet användas som extra stöd (gul knapp på manöverdosan), dock skall lår och bendel alltid vara i horisontalläge, annars finns risk för överbelastning av sängbottens delar.



2. Produktöversikt

	<p>Art nr H1048 HS Säng med fast gavel</p>
	<p>Art nr H1047 HS säng med öppningsbar fotgavel</p> <p>Ger möjlighet till fotvård, sjukgymnastik/träning m. m.</p>
 FOTO PÅ VÄG	<p>Art nr H1077 HS Säng med öppningsbar huvudgavel</p> <p>Ger möjlighet till vård av huvud och ansikte, t. ex. hårvård, sjukgymnastik/träning.</p>
 FOTO PÅ VÄG	<p>Art nr H1078 HS Säng med öppningsbar huvud- och fotgavel</p>



3. Användning av HS säng

Sidorna på HS Sängen används enligt följande:

3.1. Öppning av sida

Sidan öppnas genom att dra i handtaget som sitter mitt på sidan.



Max 15 kg drag!



Gummikanten i skyddar brukaren när sidan är nerfälld.




3.2. Stängning av sida

När sidan förs upp låses den automatiskt.

RÄTT


När sidan är stängd korrekt finns inget mellanrum mellan fästet och den röda markeringen på vajern.

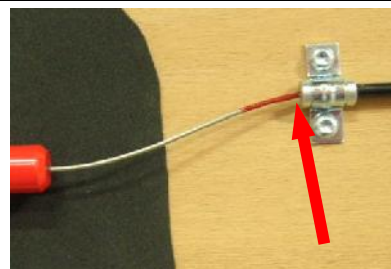

FEL



Om det finns ett mellanrum mellan fästet och den röda markeringen på vajern är sidan INTE korrekt stängd.

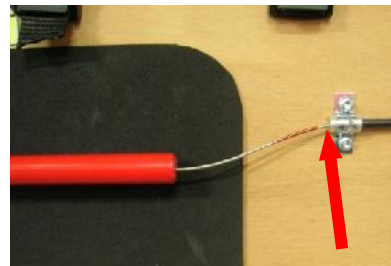



3.3. Användning av sänggavel – Gäller säng med art nr H1047, H1077 och H1078

3.3.1. Öppning av huvud- och/eller fotgavel

<p>Drag den svarta låssprinten utåt samtidigt som det grå gavellåset fälls utåt. Detta skall genomföras på båda sidor av gaveln.</p>		<p>Låt gavellåset falla ner. Detta skall genomföras på båda sidor av gaveln.</p>	
--	---	--	---

3.4. Borttagning av polsting

Om polstringen eller polstringsöverdraget behöver bytas är det enkelt att ta bort.

	<p>På utsidan av långsidorna sitter en rad med snäpplås.</p>		<p>Man låser upp snäpplåset genom att ta tag i den svarta stroppen och lyfter uppåt.</p>
	<p>På baksidan av polstringen sitter ett kardborreband. I nederkant av polstringen finns en dragkedja.</p>	<p>För att byta enbart överdraget till polstringen öppnas dragkedjan och den inre polsringen tas ut för att sedan föras in i det nya överdraget.</p>	

3.5. Montering av polstingsklädsel

	<p>Fäst polstringen med kardborrebandet.</p>		<p>Dra stropparna genom långsidans spännen och lås dem.</p>
---	--	--	---



3.6. Användning av broms

Användning av hjul med centralbroms

När sängen är placerad på sin plats skall den alltid vara låst.

1. **Bromsa:** Från neutral ställning trampa på den **röda** pedalen.
2. **Låsa upp bromsen:** Trampa på den **gröna** pedalen tills den hamnar i neutral position.

Sängens hjul kan under vissa förutsättningar ge märken på vissa typer av golv. Om man misstänker att det kan bli märken rekommenderas att man använder en skyddsplatta mellan hjul och golv.



	Bromsen skall alltid vara aktiverad när sängen står stilla för att förhindra att olyckor sker när personen kliver i och ur sängen eller vid vårdssituationer där personen flyttas i sängen.
--	---

3.6.1. Placering



	Sängen skall placeras så att höjdjusteringen av sängen inte blockeras av t. ex. lyftanordningar eller möbler. Detta kan annars innebära risk för personskada eller skador på utrustning.
--	--

3.7. Användning av handkontroll

Sängen kan utrustas med följande manöverdosor:

<p>Soft Control</p>	<p>Höjdinställning av sängen UPP/NED</p> <p>Sittinställning - grön knapp, oberoende av vilken inställning man utgår från.</p> <p>Sängbotten i horisontalläge – röd knapp, oberoende av vilken inställning man utgår från.</p> <p>"Går ur sängen-knappen" – gul knapp, höjer ryggdelen och ställer lårdelen i horisontalläge.</p> <p>Höjer lårdelen och ställer in ryggdelen i horisontalläge – grå knapp</p> <p>Inställning av bendel UPP/NER</p>
----------------------------	--

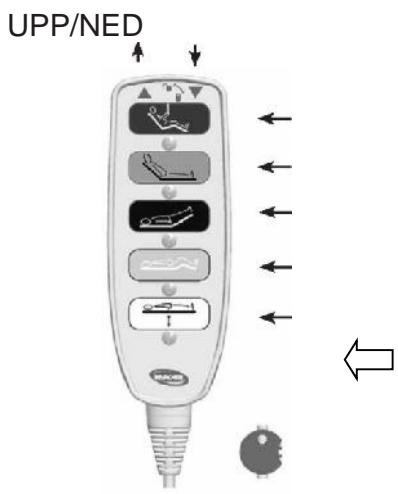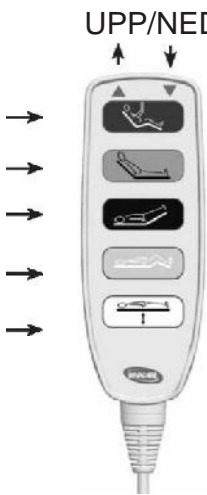


<p>HL80 med manuell avstängning av vald funtion, ACP</p> <p>UPP/NED</p> 	<p>Sittinställning – grön knapp</p> <p>Ryggdel – gul knapp</p> <p>Bendel – svart knapp</p> <p>Lårdel – grå knapp</p> <p>Höjdinställning av sängen - vit knapp</p> <p>Nyckel för avstängning eller öppning av vald funktion. Sätt in nyckeln under den funtion som skall väljas och lås eller lås upp funktionen.</p>	<p>HB80 Alternativ manöverdosa</p> <p>UPP/NED</p> 
--	---	--

4. Nödsänkning av sängbottens delar

Nödsänkning av sängbottens delar kan vara aktuell vid t. ex. strömavbrott eller vid motorfel. **Sängens höjdinställningsfunktion kan och skall INTE användas vid nödsänkning.**

Sängbottens delar kan nödsänkas genom att ta bort låssprinten på den aktuella motorn.

	<p>Minst 2 personer behövs för att nödsänka en sängbottendel.</p>
---	---

4.1. Nödsänkning steg för steg

<p>1. Ta ut stickkontakten ur vägguttaget.</p>	<p>2. Placera sängen så att man kan stå på båda sidor om sängen.</p>
<p>3. Öppna båda sidorna genom att dra i handtagen.</p>	<p>4. Placera en person på båda sidor av sängen.</p>

HS säng



Bruksanvisning

5.

Låssprinten på ryggdelen finns placerad på höger sida.

Håll i ryggstödet på båda sidor av sängen, personen på höger sida drar ut låssprinten.

Sänk ryggstödet långsamt till plant läge.



6.

Låssprinten på lårdelen är placerad på vänster sida.

Håll i lårdelen på båda sidor av sängen, personen på vänster sida drar ut låssprinten.

Sänk lårdelen långsamt till plant läge.



7.

Låssprint till bendelen är placerad på höger sida.

Håll i bendelen på båda sidor av sängen, personen på höger sida drar ut lårsprinten.

Sänk bendelen långsamt till plant läge.



Låst låssprint



Öppen låssprint – dra ut



5. Rengöring av HS Sängen

HS Sängen tål inte rengöring i tvättanläggning eller högtrycksbaserad vattenrengöring. De på marknaden vanligast förekommande desinfektionsmedlen kan användas. Torka av sängen efter tvätt. Använd aldrig syror, baser eller lösningsmedel. Se till att sängen inte är ansluten till vägguttaget vid rengöring.

5.1. Daglig rengöring

Sängen tvättas med varmt vatten och rengöringsmedel och torkas sedan av. Sängens ryggstöd och ben-/lårdel kan vikas fram över sängbotten, vilket underlättar rengöring och åtkomst till styrenhet.

Sängens underrede tvättas med vatten och borste. Man kan tvätta med vattentryck, men man får inte spola direkt på elektroniken med högtryckstvätt.

5.2. Rengöring av madrass och polstring

Madrass och polstring är tillverkad med ett inkontinensskydd och kan tvättas med varmtvatten och rengöringsmedel eller desinficeringsmedel. Använd aldrig syror, baser eller lösningsmedel. Torka av madrass och polstring efter tvätt.




Överdrag och polstring får inte tvättas i tvättmaskin.



6. Felsökning av elektronik

OBS! Kontrollera först att kontakten sitter i vägguttaget och att nätspänning finns.

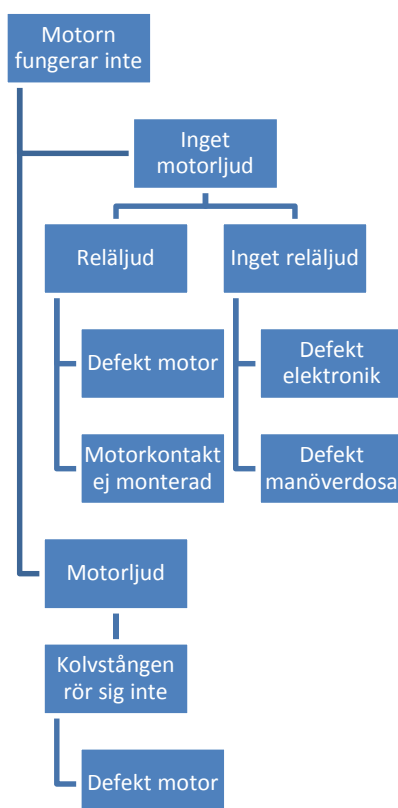

7. Avfallshantering

Denna produkt är framställd av en miljömedveten leverantör.

Den här produkten kan innehålla ämnen som kan skada miljön om den inte återvinns enligt Svensk lagstiftning.

Symbolen, den "överkryssande soptunnan" är placerad på denna produkt för att uppmana till återvinning då det är möjligt.

Vänligen tag miljöansvar och återvinn denna produkt genom din lokala återvinningsstation.

