

# TUMLE Flytkuddar

Denna bruksanvisning avser TUMLE flytkuddar och tillhör med artikelnummer som börjar med siffran 9. Artikelnummret finns angivet i anslutning till produktetiketten.

## Bruksanvisning kortversion

TUMLE flytkuddar är utvecklade för rehabilitering/habilitering och avslappning i bassäng, men vissa modeller passar även i hygiensituationer i duschstol eller på duschbreds. Lämpliga i hygiensituation är alla modeller utom Halsflytkragarna.

**TUMLE flytkuddar uppfyller inte krav för räddningsutrustning och får inte förväxlas med flyt- eller räddningsväst. TUMLE flytkuddar är flythjälpmiddel för användning i bassäng. Lämna aldrig användaren utan tillsyn. Assisterande person har ansvaret för den badandes säkerhet.**

Material: Väv och nät i polyester. Fyllningen är polystyrenkuler EPS.

### I bassäng

Kuddarna kan användas i klorhaltigt vatten. Efter användning skall kudden sköljas rikligt med oklorerat vatten och placeras luftigt med nätsidan vänd nedåt, så att vatten lätt kan rinna ut. Låt sedan kudden droptorka. Placera inte kuddar ovanpå varandra. Skall kuddar packas för transport måste de först vara helt torra då risk för mögel annars föreligger. Vid behov kan kudden tvättas **i maskin i max 60 ° C förutsatt att TVÄTTPÅSE används**. Använd EJ sköljmedel. Droptorka alternativt torkskåp vid max 60 ° C. Torktumling på låg värme med tvättpåse är också möjlig med efterföljande lufttorkning.

### I hygiensituation

TUMLE flytkudde kan användas för att stabilisera en person i duschstol eller på duschbreds. Av hygieniska skäl är det extra viktigt att efter användning skölja ur kudden noga med rent vatten och se till att kudden torkar så fort som möjligt, gärna i torkskåp max 60 ° C. Vid behov kan kudden tvättas **i maskin i max 60 ° C förutsatt att TVÄTTPÅSE används**. Använd EJ sköljmedel. Droptorka alternativt torkskåp vid max 60 ° C. Torktumling på låg värme med tvättpåse är också möjlig med efterföljande lufttorkning.

### Viktig information

Använd inte kemtvätt, lösningsmedel, blekmedel eller sköljmedel.

Använd inte tvättmedel med pH värde över 11,4.

Undvik skarpa kanter och spetsiga föremål och klämrisk mot kuddarna.

Går det håll på kuddarna, så att fyllningen kommer ut, mister kuddarna flytkraft och skall kasseras.

Kontrollera regelbundet kuddarna avseende skador.

Undvik användning utomhus i sjö- eller havsvatten, då föroreningar kan orsaka mögel.

Använd inte kudden tillsammans med badoljor.

Håll andningsvägar fria.

Vi rekommenderar att man inte använder samma kudde i hygiensituation som i bassäng.

Kuddarna är märkta med artikelnummer, tillverkningsår, varning för täppta andningsvägar och öppen eld.

TUMLE flytkuddar deponeras till förbränning med vanligt hushållsavfall.

**OBS! - Polystyrenkuler smälter vid 71 ° C.**



Använd **TVÄTTPÅSE**. Kuddens vikt ökas betydligt när den vattenfylls. Var noga med att inte överfylla maskinen. **Återanvändning till ny brukare: Vi hänvisar till lokala Hygienföreskrifter.**

### Användaranvisning för Halsflytkragen på nästa sida

URIFORM

URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck.  
Tel. 08-7029774, Fax 08-6402957, e-post: order@uriform.se  
www.tumle.uriform.se

CE


EN 12182:2012  
EN ISO 14971:2012

# Anvisning för **TUMLE** halsflytkrage


Halsflytkragen används till personer som flyter på rygg i bassäng.

Halsflytkragen är ingen flytväst/räddningsväst utan används som flythjälp med assistans av personal.


- 1 Läggs Halsflytkragen runt användarens nacke och fram på bröstet. Den svarta sidan skall vara utåt och den blå in mot användaren.

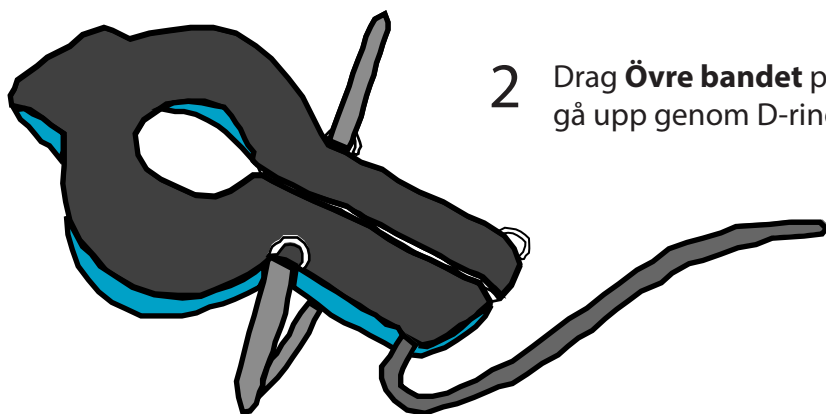

- 2 Drag **Övre bandet** på baksidan av kudden och låt det gå upp genom D-ringen på andra sidan.

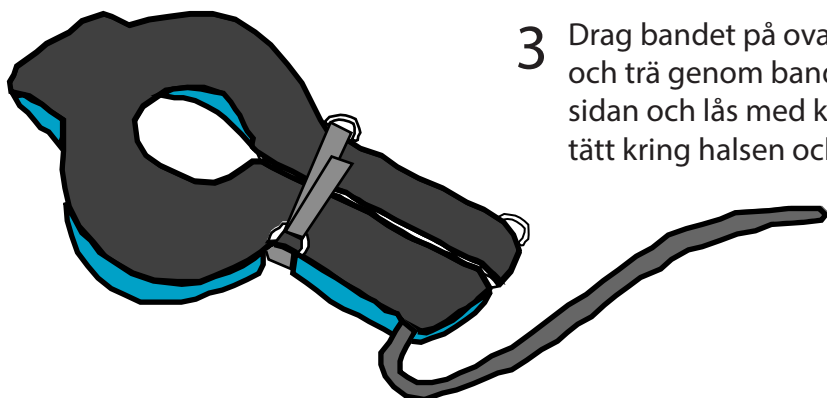

- 3 Drag bandet på ovansidan bort till den andra D-ringen och trä genom bandet. Drag bandet tillbaks på ovansidan och lås med kardborre. Se till att kragen ligger tätt kring halsen och att hakan vilar ovanpå kudden.

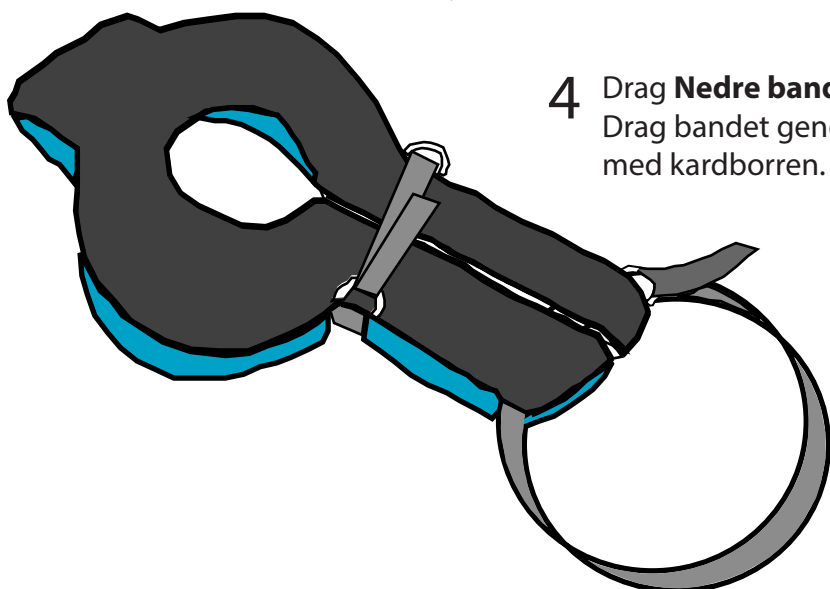

- 4 Drag **Nedre bandet** bakom ryggen på användaren. Drag bandet genom och runt nedre D-ringen och lås med kardborren.