

BRUKSANVISNING

TUMLE flytkuddar

Juni 2015

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kära kunder	2
Generell information	2
Före användning	2
Produktbeskrivning och användning	2
Material	2
Märkning	2
Rengöring och underhåll	3
Förvaring	3
Säkerhetsinformation	3
Avfallshantering	4
Reklamation och retur	4
Livstid och reklamationsrätt	4
Symbolförklaringar	4
Kontaktinformation	4
Anvisning Halsflytkrage	5



Denna bruksanvisning avser TUMLE flytkuddar med artikelnummer som börjar med siffran 9. Artikelnumret finns angivet i anslutning till produktetiketten.

KÄRA KUNDER

Vi vill gärna tacka dig för ditt köp av TUMLE flytkuddar. Vi är säkra på att de kommer att vara till stor hjälp och nytta. Denna bruksanvisning ger nyttiga upplysningar om produkten, såsom användning, skötsel, säkerhetsrisker och tekniska data. Vi ber dig läsa bruksanvisningen grundligt innan kudden tas i bruk och sedan spara den för senare användning.

GENERELL INFORMATION

TUMLE flytkuddar används som hjälpmedel vid rehabilitering och uppfyller kraven på CE-märkning för produkter i Klass 1. Kuddarna är tillverkade i överensstämmelse med EU Direktiv 93/42/EEC 1993 och standard EN 12182:2012 och EN ISO 14971:2012. Eventuella olyckor eller tillbud som rör våra produkter ska omgående rapporteras till URIFORM AB. TUMLE flytkuddar uppfyller inte krav för räddningsutrustning och får inte förväxlas med flyt- eller räddningsväst. TUMLE flytkuddar är flythjälpmedel för användning i bassäng. Lämna aldrig användaren utan tillsyn. Assisterande person har ansvaret för den badandes säkerhet.

FÖRE ANVÄNDNING

Kontrollera alltid att kuddarna är intakta och inte skadade. Använd inte skadade eller defekta produkter. Kontakta URIFORM och informera om skadans omfattning.

PRODUKTBESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

TUMLE flytkuddar är utvecklade speciellt till barn och vuxna med funktionsnedsättning, men kan också användas av alla som önskar extra stöd i bassängen. Flytkuddarna används till positionering i bassäng/swimmingpool under träning och vid olika former av vattenterapi. Flytkuddarna finns i flera olika modeller och storlekar till både barn och vuxna. De olika modellerna kan användas var för sig eller kombineras allt efter varje brukares behov. Kuddarnas stora flytkraft samt material känns behaglig mot huden och ger brukaren en trygg och behaglig upplevelse i bassängen. Se vidare i broschyren TUMLE flytkuddar. Flytkuddarna kan med fördel placeras omkring brukaren redan innan brukaren kommer i bassängen.

TUMLE flytkuddar kan också användas i hygiensituationer som stöd i toalett/hygienstol där de formar sig och fyller ut kring brukaren.

MATERIAL

Väv och nät i polyester. Fyllningen är polystyrenkulor EPS

MÄRKNING

Produkten är CE märkt enligt MDD 93/42/EEC. Etikett med information om tillverkare, leverantör, produktnamn, artikelnummer, tillverkningsår, material, tvättanvisningar och varningar finns på kudden. Se Symbolförklaringar sid 6.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

I bassäng

Kuddarna kan användas i klorhaltigt bassängvatten. Efter användning ska kudden sköljas rikligt med oklorerat vatten och placeras luftigt med nätsidan vänd nedåt så att vatten lätt kan rinna ur. Låt sedan kudden dropptorka. Placera inte kuddar ovanpå varandra. Skall kuddar packas för transport måste de först vara helt torra då risk för mögel annars föreligger.

Vid behov kan kudden tvättas i maskin i max 60 grader C förutsatt att TVÄTTPÅSE används. Kuddens vikt ökas betydligt när den vattenfylls. Var noga med att inte överfylla maskinen. Använd EJ sköljmedel. Dropptorka eller torkskåp max 60 grader C. Torktumling på låg värme med tvättpåse är också möjlig, men med efterföljande lufttorkning.

I hygiensituation

TUMLE flytkuddar kan användas för att stabilisera en person i duschstol eller på duschbrits. Av hygieniska skäl är det extra viktigt att efter användning skölja ur kudden noga med rent vatten och se till att kudden torkar så fort som möjligt, gärna torkskåp max 60 grader C.

Vid behov kan kudden tvättas i maskin i max 60 grader C förutsatt att TVÄTTPÅSE används. Kuddens vikt ökas betydligt när den vattenfylls. Var noga med att inte överfylla maskinen. Använd EJ sköljmedel. Dropptorka eller torkskåp max 60 grader C. Torktumling på låg värme med tvättpåse är också möjlig, men med efterföljande lufttorkning.

Generellt för flytkuddar gäller:

Kuddens fyllning smälter vid temperatur över 71° C.

Använd inte kemtvätt, lösningsmedel, blekmedel, sköljmedel eller medel som har pH värde över 11,4.

Flytkuddarna ska inte användas tillsammans med badoljor.

Återanvändning till ny brukare: Vi hänvisar till lokala Hygienföreskrifter.



FÖRVARING

TUMLE Flytkuddar kan med fördel förvaras på badhuset respektive ventilerat badrum. Det rekommenderas att flytkuddarna alltid hängs upp, när de inte är i bruk. Lämna inte kuddarna våta eller fuktiga på golv, i kassar eller liknande, då detta kan medföra mögelbildning i kudden.

Undvik att kuddarna kommer i kontakt med skarpa föremål eller rivs mot skrovliga ytor. Var särskilt uppmärksam vid bassängkanten när kuddarna tas i och ur vattnet. I hygiensituation gäller motsvarande försiktighet och här vill vi särskilt varna för klämrisk av kudden i fästen till arm- och benstöd.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs alltid bruksanvisningen innan kudden används. Produkten får bara användas till avsett ändamål.

Trots flytkuddarnas stora flytkraft får de inte förväxlas med flyt- eller räddningsvästar eller annan räddningsutrustning.

Assisterande person har ansvaret för den badandes säkerhet.

Lämna aldrig användaren utan tillsyn.

Det är viktigt att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria. Var extra uppmärksam på barn under 3 år och personer som inte kan röra sig eller ta eget ansvar för sin situation.

Placera aldrig brukaren så att vatten eller flytkudden kan blockera andningsvägarna. Undvik skarpa, spetsiga eller skrovliga föremål mot produkten som kan skada och riva hål på kudden.

forts.

SÄKERHETSINFORMATION forts.

Kontrollera regelbundet kuddarna. Sker läckage av kulor, ska dessa genast rensas bort från bassängen. Skadad kudde mister sin flytkraft samt sin funktion och ska kasseras.

Fyllningen får inte ätas eller stoppas i mun, öron, näsa eller ögon.

Produkten får inte användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor eller varma ytor, såsom öppen eld, kamin, cigaretter eller värmelampor.

Undvik användning utomhus i sjö- och havsvatten då föroreningar kan utveckla mögel.

Vi rekommenderar att man inte använder samma kudde i hygientsituation som i bassäng.

AVFALLSHANTERING

Kuddarna slängs som vanligt hushållsavfall (brännbart).

LIVSTID OCH REKLAMATIONSRÄTT

Produkten har en förväntad livstid på 2 år. Garanti gäller i 2 år. Garantin gäller inte för normalt slitage eller oaksamhet om produkten. Tillverkaren tar inget ansvar för skador på produkt eller brukare, som uppstått pga transport, missbruk, oaksamhet, fel hantering eller skötsel. Ej heller anpassningar gjorda av annan än tillverkaren.

TUMLE flytkudde tillverkas av: Lil-Bett A/S under märket Lasal i Danmark

REKLAMATION OCH RETURNERING

Reklamationer ska anmälas till leverantören så fort som möjligt med en beskrivning av problemet. Retur kan bara ske efter att kontakt tagits med URIFORM. Transportskador skall anmälas till transportfirman direkt vid leveransen.



Maskintvätt 60 °C



Ej blekmedel



Ej kemtvätt



Droptorkas



Se bruksanvisning



Torktumlas



Undgå kontakt med skarpa verktyg



Ej strykas



Håll eld på avstånd

KONTAKTUPPGIFTER

TUMLE kudden distribueras i Sverige av: URIFORM AB, Bellmansgatan 24, 118 47 Stockholm

Support: Marie Rehn 08-7029774, 072-5293035 marie.rehn@uriform.se

Produktspecialist i södra Sverige: Annika Salminen 076-7222533, annika.salminen@uriform.se

Produktspecialist mellersta Sverige: Petra Sandsten 072-5069771, petra.sandsten@uriform.se

Produktspecialist i norra Sverige: Maria Jonsson 076-7878535, maria.jonsson@uriform.se

Godsadress: Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck

Kundtjänst: 08-7029774, fax 08-6402957, e-post order@uriform.se.

Godsadress: URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck

TUMLE flytkudde tillverkas av: Lil-Bett A/S under märket Lasal i Danmark



EN 12182:2012
EN ISO 14971:2012

URIFORM