

TUMLE

dentalkuddar

2018-4

TUMLE dentalkuddar är en serie kuddar som utvecklats i samarbete mellan URIFORM AB och Mun-H-Center vid Odontologen i Göteborg. Kuddarna är utformade för att ge patienten stöd och trygghet.

Det finns olika kuddar för stöd under huvud och nacke, under skuldror och armar, under knän, ben och fötter. Kuddarna används var för sig eller i kombination med varandra.

Vuxentandvård






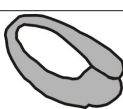



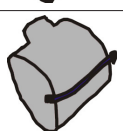
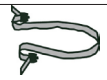

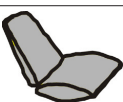
För att uppnå en bra kroppsställning i en behandlingsstol behöver patienten sitta med avspänd och väl understödd kropp. Leder och muskler bör befinna sig i viloläge. Många med funktionsnedsättning har problem med detta, ex vid neurologiska sjukdomar, reumatiska besvär och psykiska tillstånd. För en spastisk person är det viktigt att påverka muskelspänningen genom att bryta ett sträckmönster. Detta kräver bl a att armarna hamnar i mjuk böjning framför kroppen med hjälp av en Omgärdare. I höfterna behöver benen böjas och föras isär för att kroppen ska uppnå en avslappnad position med hjälp av Benavslappare och Underbenskudde.



Barntandvård

För ett barn fyller dentalkuddar ut behandlingsstolen så att den passar bättre i storlek. Kuddarna är också mysiga att se på och att vara i. För barn med funktionsnedsättningar hjälper kuddarna till att hålla balansen och att finna stöd. Anhörig eller assistent behöver inte sitta med barnet i knät. Behandlingen kan utföras tryggt i behandlingsstolen istället för i en rullstol. Omgärdare och Benavslappare finns i barnstorlek. Dessutom finns en sittkudde för barn som ger stöd längs hela ryggen och lyfter barnet i stolen till rätt höjd för behandling. Flera alternativ till huvudsupport finns för barn och vuxna.

URIFORM

	Benämning	Kudde	Kudde med hygien överdrag	Kudde med EKO överdrag	Hygien överdrag	EKO överdrag	Beskrivning
	Nackpuff	707001			707004		Nackpuffen placeras i nacken vid sittande i behandlingsstol.
	Ostbåge	707101			707104		Placeras i nacken för den som behöver mer stöd i nacke och huvud.
	Huvudstöd asymmetrisk	707201			707204		Huvudstöd asymmetrisk placeras under huvudet sittande i behandlingsstol.
	Huvudstöd symmetrisk	707211			707214		Huvudstöd symmetrisk placeras under huvudet sittande i behandlingsstol
	Halvmåne	707301			707304		Halvmånen läggs som ett stöd i nacken med framdragna snibbar vid öronen.
	Omgärdare vuxen	707401			707404		Omgärdaren för vuxna placeras under nacken, skulderna och överarmar och löper sedan längs kroppens sidor för att sist läggas upp över magen, där den hålls ihop med kardborreband. Underarmar och händer placeras bekvämt ovanpå kudden.
	Omgärdare barn	707421			707424	707509	Omgärdaren för vuxna placeras under nacken, skulderna och överarmar och löper sedan längs kroppens sidor för att sist läggas upp över magen, där den hålls ihop med kardborreband. Underarmar och händer placeras bekvämt ovanpå kudden
	Fyrkantskudde		707501-04	707501-09	707504	707509	Fyrkantskudden placeras under benen gör att ge avlastning, underlättar för personer som har svårt att räta ut benen eller är känsliga för tryck.
	Benavslappare vuxen		707601-04	707601-09	707604	707609	Benavslapparen för vuxna är i sin övre del formad som ett T som placeras mellan knäna och under knävecken och fortsatt ned under låren. Följer personens individuella kroppsställning och avlastar så att det är lättare att slappna av. Kan kombineras med Underbenskudde
	Benavslappare barn		707621-24	707621-29	707624	707629	Benavslapparen för barn är i sin övre del formad som ett T som placeras mellan knäna och under knävecken och fortsatt ned under låren. Följer personens individuella kroppsställning och avlastar så att det är lättare att slappna av
	Fästband till benavslappare vuxen & barn	707606					Fästbandet läggs runt behandlingsstolen och fästs i benavslapparen.
	Underbenskudde vuxen		707701-04	707701-09	707704	707709	Underbenskudden kan kombineras med Benavslappare för vuxna. Den ger en ökad möjlighet till individuell support.
	Sittkudde barn		707821-24	707821-29	707724	707729	Sittkudden för barn är en kombination av sittkudde och en tunn ryggdyna. Barnet förflyttas framåt och uppåt i sitsen. Sittkudden balanserar bäckenet och fördelar trycket från kroppen lika över hela sittytan. Ryggdynan följer barnets rygg och fyller ut en eventuell snedställning eller annan asymmetri och hela ryggen får jämt fördelat stöd.

Produktinformation

Fyllning: polystyrenkulor

Ytterhölje: polyuretanbelagd polyester

Hygienöverdrag: polyuretanbelagd polyester. Hygienöverdrag kan beställas till samtliga modeller.

EKO överdrag: stickad jersey i cellulosafiber med mjuk sammetslik utsida medan insidan är polyuretanbelagd.

Rengöring:

Kudden torkas av för hand med vanligt rengöringsmedel. Därefter avtorkning med sprit.

Hygienöverdrag tvättas i maskin i upptill 95 grader. Använd ej sköljmedel.

Ekoöverdrag tvättas i maskin i 60 grader.

Använd ej sköljmedel

TUMLE dentalkuddar består av ett vattentätt kuddvar med fyllning av polystyrenkulor samt för vissa kuddar ett hygienöverdrag som tillval. Fyllningen kan skada tvättmaskin eller torktumlare om kulor kommer fria. Vid behov torkas kudden med vanligt förekommande rengöringsmedel utan att sänkas i vatten. Hygienöverdrag maskintvättas upp till 95° C. Desinfektion på innerkudde och hygienöverdrag sker med vanligt förekommande desinfektionsmedel innehållande tensider, t ex Ytdesinfektion eller Virkon. EKO överdrag maskintvättas upp till 60° C. Använd ej sköljmedel. Fyllningen av polystyrenkulor är flamsäkra. Kudde och överdrag är testade och godkända för brandsäkerhet. Undvik skarpa kanter och föremål emot kudden. Tillså att andningsvägarna inte blockeras av kudden. Trots hög komfort och maximal tryckfördelning är TUMLE dentalkuddar ingen antidecubitus produkt. TUMLE dentalkudde kan deponeras som vanligt hushållsavfall.

URIFORM

