

BRUKSANVISNING

TUMLE flytkuddar och hygienkuddar

Juni 2018

Denna bruksanvisning avser TUMLE flytkuddar med artikelnummer som börjar med siffran 9. Artikelnumret finns angivet i anslutning till produktetiketten.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kära kunder	2
Generell information	2
Före användning	2
Produktbeskrivning och användning	2
Material	2
Märkning	2
Rengöring och underhåll	3
Förvaring	3
Säkerhetsinformation	3
Avfallshantering	4
Reklamation och retur	4
Livstid och reklamationsrätt	4
Symbolförklaringar	4
Kontaktinformation	5



KÄRA KUNDER

Vi vill gärna tacka dig för ditt köp av TUMLE flytkuddar. Vi är säkra på att de kommer att vara till stor hjälp och nytta. Denna bruksanvisning ger nyttiga upplysningar om produkten, såsom användning, skötsel, säkerhetsrisker och tekniska data. Vi ber dig läsa bruksanvisningen grundligt innan kudden tas i bruk och sedan spara den för senare användning.

URIFORM AB

GENERELL INFORMATION

TUMLE flytkuddar används som hjälpmedel vid rehabilitering och uppfyller kraven på CE-märkning för produkter i Klass 1. Kuddarna är tillverkade i överrensstämmelse med EU Direktiv 93/42/EEC 1993 och standard EN 12182:2012 samt EN ISO 14971:2012.

FÖRE ANVÄNDNING

Kontrollera alltid att kuddarna är intakta och inte skadade. Använd inte skadade eller defekta produkter. Kontakta URIFORM och informera om skadans omfattning.

PRODUKTBESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

TUMLE flytkuddar är utvecklade speciellt till barn och vuxna med funktionsnedsättning, men kan också användas av alla som önskar extra stöd i bassängen.

TUMLE flytkuddar får enbart användas i klorerat vatten.

Flytkuddarna finns i flera olika modeller och storlekar till både barn och vuxna. De olika modellerna kan användas var för sig eller kombineras allt efter varje brukares behov. Vilka kuddar, samt hur många, som skall användas beror på vilken aktivitet som ska ske, användarens förmågor och om det används några andra hjälpmedel i vattnet. Vårdpersonal bedömer utifrån sin kunskap om användaren vilka produkter som ska användas vid den givna situationen.

OBS! Vid följande modeller; 9601, 9602, 9603, 9604, 9605, 9703, 9704, 9708 och 9709 är det viktigt att försäkra sig om att kudden inte flyter ifrån användaren när denne är i vattnet. Kuddarna kan inte fästas omkring kroppen och är enbart utformad för att stötta intill kroppen. Användare skall därför kunna själv hålla sig fast i kudden eller med hjälp av personal.

Kuddarna har en stor flytkraft och tack vare den speciella sammansättningen av material känns den behaglig mot huden och ger brukaren en trygg och behaglig upplevelse i bassängen.

Flytkuddarna kan med fördel placeras omkring brukaren redan innan brukaren kommer i bassängen.

TUMLE flytkuddar kan också användas i hygienesituationer som stöd i toalett/hygienstol där de formar sig och fyller ut kring brukaren.

Flytkuddarna har en blå och en svart sida. Det rekommenderas att den svarta sidan vänds mot kroppen. Undvik att gnugga huden mot den blå sidan.

TUMLE flytkuddar finns i följande varianter:

Halsflytkrage; 4 storlekar
Kort halsflytkrage; 4 storlekar
Halvmånekudde: 1 storlek
Nackflytkrage; 1 storlek
Bananformad kudde; 3 storlekar
T formad kudde; 2 storlekar
Blom formad kudde; 2 storlekar
Supportkudde; 2 storlekar

Se Produktguide TUMLE flytkuddar för artikelnummer och mått.

MATERIAL

Fyllning: Polystyrenkulor
Överdrag: översida: 100% polyester
Överdrag: undersida: 100% polyesternät

MÄRKNING

Produkten är CE märkt enligt MDD 93/42/EEC och därmed EN 980. Etikett med information om tillverkare, leverantör, produktnamn, artikelnummer, tillverkningsår, material, tvättanvisningar och varningar finns på kudden. Se Symbolförklaringar sid 5.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Efter användning skall flytkuddarna sköljas ordentligt med rent oklorerat vatten. Kuddarna hängs upp en och en så att de kan droptorka och vattnet fritt kan rinna ur kudden. Den blå nätsidan vänds nedåt så att vattnet fritt kan rinna ur kudden. Det tar tid för kuddarna att helt torka därför rekommenderas att de uteslutande används i våta miljöer.

TUMLE flytkuddar kan vid behov tvättas i maskin på max 60 grader. Använd inte sköljmedel, blekmedel eller andra rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. TUMLE flytkuddar kan även tvättas med ytdesinfektionsmedel 40% Isopropylalkohol med tensid eller 70% Etanolalkohol med tensid, samt att de klarar 1% och 3% VirKon. Var uppmärksam på att PH-värdet på desinfekteringsmedel inte överstiger 11,4. Flytkuddarna kan torkas i torkskåp vid max 60 °C. Polystyrenkulorna smälter och förstörs vid temperatur över 71 °C. Polystyrenkulor som kommer i kontakt med värmeelement i en tvätt- eller torktumlare kan därför skada sådana maskiner. Flytkuddarna ska inte användas tillsammans med badoljor.

Flytkuddar som används i hygiensituation kan vara svåra att få helt rena från tvålrester och smuts. Därför rekommenderas att kudden vid användning i hygiensituationer är personbunden.



FÖRVARING

TUMLE Flytkuddar kan med fördel förvaras på badhuset. Det rekommenderas att flytkuddarna alltid hängs upp, när de inte används. Lämna inte kuddarna våta eller fuktiga på golv, i kassar eller liknande, då detta kan medföra mögelbildning i kudden. Undvik att kuddarna kommer i kontakt med skarpa föremål eller rivs mot skrovliga ytor. Var särskilt uppmärksam vid bassängkanten när kuddarna tas i och ur vattnet.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs alltid bruksanvisningen innan kudden används. Produkten får bara användas till avsett ändamål.

Trots flytkuddarnas stora flytkraft får de inte betraktas som räddningsvästar eller annan räddningsutrustning.

Se alltid till att det är assisterande personal i vattnet och lämna aldrig brukaren ensam eller utan tillsyn.

Det är viktigt att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.

Var extra uppmärksam på barn under 3 år och personer som inte kan röra sig eller ta eget ansvar för sin situation.

Placera aldrig brukaren så att vatten eller flytkudden kan blockera andningsvägarna. Undvik skarpa, spetsiga eller skrovliga föremål mot produkten som kan skada och i värsta fall riva hål på produkten.

Använd aldrig skadade flytkuddar. Sker läckage av kulor, ska dessa genast rensas bort från bassängen. Fyllningen får inte ätas eller stoppas i mun, öron, näsa eller ögon. Produkten får inte användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor eller varma ytor, såsom öppen eld, kamin, cigaretter eller värmelampor.

Flytkuddar som används i havs- eller sjövatten kan utveckla mögel på grund av orent vatten. Kudden måste ovillkorligen sköljas omgående i rent vatten och hängas fritt.

AVFALLSHANTERING

Kuddarna slängs som vanligt hushållsavfall (brännbart).

REKLAMATION OCH RETURNERING

Reklamationer ska anmälas till leverantören så fort som möjligt med en beskrivning av problemet. Retur kan bara ske efter att kontakt tagits med URIFORM. Transportskador skall anmälas till transportfirman direkt vid leveransen.

LIVSTID OCH REKLAMATIONSRÄTT

Produkten har en förväntad livstid på 2 år. Garanti gäller i 2 år. Garantin gäller inte för normalt slitage eller oaktsamhet om produkten. Tillverkaren tar inget ansvar för skador på produkt eller brukare, som uppstått pga transport, missbruk, oaktsamhet, fel hantering eller skötsel. Ej heller anpassningar gjorda av annan än tillverkaren.

SYMBOLFÖRKLARINGAR



Handtvätt



Ej blekmedel



Ej kemtvätt



Dropptorkas



Ej strykas



Ej torktumlas



Se bruksanvisning



Håll eld på avstånd



Undgå kontakt med skarpa verktyg

KONTAKTUPPGIFTER

TUMLE flytkudde tillverkas av:

Lasal A/S i Danmark

TUMLE kudden distribueras i Sverige av:

URIFORM AB, Postflygsgatan 8B, 128 30 Skarpnäck

Telefon: 08-702 97 74

E-post: tumle@uriform.se

Hemsida: www.uriform.se

TUMLE kudden distribueras i Sverige av: URIFORM AB, Bellmansgatan 24, 118 47 Stockholm

TUMLE flytkudde tillverkas av: Lasal A/S i Danmark

URIFORM



EN 12182:2012
EN ISO 14971:2012

Rätt till produktförändringar utan föregående avisering förbehålles.
© URIFORM AB 2018-1