

# TUMLE flytkuddar och hygienkuddar

Denna bruksanvisning avser TUMLE flytkuddar och tillbehör med artikelnummer som börjar med siffran 9. Artikelnummret finns angivet i anslutning till produktetiketten.

## Bruksanvisning kortversion

TUMLE flytkuddar är utvecklade för träning och rehabilitering i vatten.

**TUMLE flytkuddar uppfyller inte krav för räddningsutrustning och får inte användas istället för flyt- eller räddningsväst. Ansvar för den badandes säkerhet, drunkningsrisk eller andra skador åligger alltid assisterande personal, oavsett om TUMLE flytkuddar har varit i användning eller ej.**

TUMLE flytkuddar är fyllda med polystyrenkulor.

Kuddarna kan användas i klorhaltigt bassängvatten. Efter användning skall kudden sköljas rikligt med oklorerat vatten och placeras luftigt med nätsidan vänd nedåt så att vatten lätt kan rinna ur. Låt sedan kudden dropporka. Placera inte kuddar ovanpå varandra. Skall kuddar packas för transport måste de först vara helt torra då risk för mögel annars föreligger.

TUMLE flytkuddar kan vid behov tvättas i tvättpåse i maskin på max 60 °C. Använd inte sköljmedel, blekmedel eller andra rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Flytkuddarna kan torkas i torkskåp på 60 grader C. OBS! polystyrenkulorna smälter vid 71 grader C. TUMLE flytkuddar kan även tvättas med ytdesinfektionsmedel 40% Isopropylalkohol med tensid eller 70% Etanolalkohol med tensid, samt att de klarar 1% och 3% VirKon. Var upp-märksam på att PH-värdet på desinfektionsmedel inte överstiger 11,4.

## Viktig information

Använd inte kemtvätt, lösningsmedel eller blekmedel.

Undvik skarpa kanter och spetsiga föremål mot kuddarna.

Går det hål på kuddarna, så att fyllningen kommer ut, mister kuddarna flytkraft och skall kasseras.

Kontrollera regelbundet kuddarna avseende skador.

Undvik användning utomhus i sjö- eller havsvatten då föroreningar kan orsaka mögel.

Kuddarna är märkta med artikelnummer, tillverkningsår, varning för täppta andningsvägar och öppen eld.

TUMLE flytkuddar deponeras till förbränning med vanligt hushållsavfall.

## Bruksanvisning för TUMLE flytkuddar i hygiensituation

TUMLE flytkuddar kan användas för att stabilisera en person i duschstol eller på duschbrits.

Av hygieniska skäl är det extra viktigt att efter användning skölja ur kudden noga med rent vatten och se till att kudden dropporkar fortast möjligt, gärna i torkskåp vid max 60 ° C.

Använd aldrig badoljor tillsammans med TUMLE flytkuddar.

**I hygiensituation kan det ibland vara svårt att tömma kudden helt ren från tvålrester och andra föroreningar, därför rekommenderas att kudden är personbunden.**

**Användaranvisning för Halsflytkragen på nästa sida.**

URIFORM



EN 12182:2012  
EN ISO 14971:2012

URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck  
Tel: 08-7029774, Fax 08-6402957, e-post:order@uriform.se  
www.tumle.uriform.se

# Anvisning för **TUMLE** halsflytkrage


Halsflytkragen används till personer som flyter på rygg.

Halsflytkragen är ingen flytväst/räddningsväst utan används som flythjälp med assistans av personal.


- 1 Läggs Halsflytkragen runt användarens nacke och fram på bröstet. Den svarta sidan skall vara utåt och den blå in mot användaren.



- 2 Drag **Övre bandet** på baksidan av kudden och låt det gå upp genom D-ringen på andra sidan.

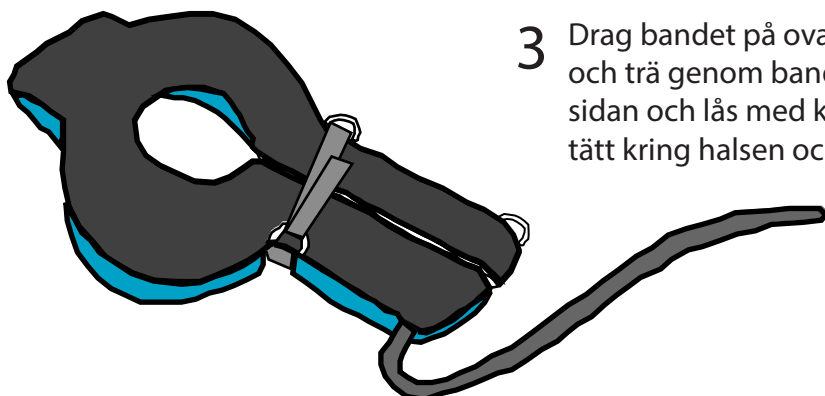

- 3 Drag bandet på ovansidan bort till den andra D-ringen och trä genom bandet. Drag bandet tillbaks på ovansidan och lås med kardborre. Se till att kragen ligger tätt kring halsen och att hakan vilar ovanpå kudden.

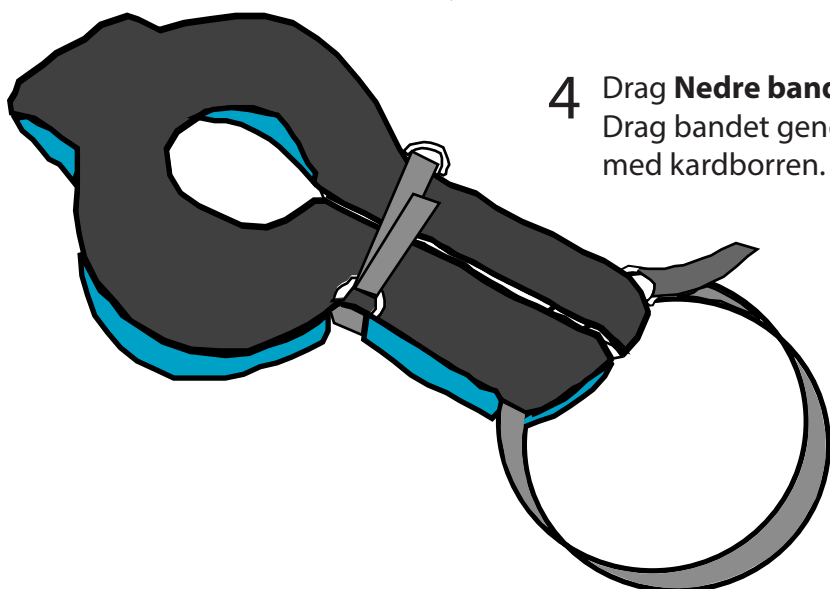

- 4 Drag **Nedre bandet** bakom ryggen på användaren. Drag bandet genom och runt nedre D-ringen och lås med kardborren.

URIFORM

CE

EN 12182:2012  
EN ISO 14971:2012