

Brukarmanual

MobiBed

Transportunderrede



URIFORM



URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck
Tel: 08-7029774, Fax 08-6402957, e-post: order@uriform.se
www.tumle.uriform.se

Innehållsförteckning

1.	Inledning.....	3
	Snabb guide	3
	Symboler.....	3
2.	Innan underredet tas i bruk	4
	Förberedelser	4
	Checklista	4
3.	Produktbeskrivning	5
	Belastning och brukarvikt.....	5
	Inställningsmöjligheter.....	5
4.	Säkerhetsinformation.....	6
	Belastning.....	6
	Användning av lyftfunktionen.....	6
	Transport i bil	6
	Säkring under transport.....	6
	Sits/sitsram och fotstöd.....	6
	Bromsar och hjul	6
	Användning av säkerhetsbälte	7
	Var extra uppmärksam på	7
	I första hand för inomhus bruk	7
	Klämrisk	7
	Viktigt för att undvika risk	7
5.	Laddning och batterivård	8
6.	Inställningsmöjligheter.....	9
	Handkontrollen.....	9
	Höjjustering.....	9
	Längdjustering	9
	Körhandtaget	10
	Bromsfunktion	10
	Justering av bromsfunktion	10
7.	Sittmodulen och positioneringskuddar	11
	Sittmodulen	11
	Madrass med positioneringskuddar.....	12
	Montering av säkerhetsbälte.....	12
8.	Underhåll.....	13
	Rengöring av vagnen	13
	Rengöring av kuddar	13
	Desinfektion	13
	Smörjning	13
	Efterjustering	13
	Reparation.....	13
	Årlig kontroll.....	13
	Reklamation.....	13
9.	Felsökning.....	14
10.	Reservdelslista.....	15
11.	Specifikationer.....	16

1. Inledning

Bästa kund!

Vi vill tacka för att du valt att köpa MobiBed.
Vi är övertygade om att du och dina närmaste
kommer att få mycket glädje av den.
Brukarmanualen ger dig viktig information om olika
inställningar, användarinstruktion, underhåll,
säkerhetsfrågor, tekniska data m.m.

1.1 Manualen är viktig

Läs manualen noga och spara den för
senare bruk. Den skall alltid finnas till-
gänglig tillsammans med din MobiBed.

1.2 Snabb guide

För att underlätta för dig har vi valt att
göra en Snabb Guide som tar upp in-
ställningar och laddning av
batteriet. Vi vet att dessa frågor
ofta är aktuella och vi föreslår
att Snabbguiden därför förvaras i
plastfickan på ryggstödet så att den
alltid finns till hands.

!! OBS - OBS!!

Var noga med att assistent och
användare är informerade om
möjliga problem.



Viktig Information!

För brukare och assistent för att
undvika skada på produkten.



Varning!

För brukare och assistent för att
undvika personskada.



Minsta längd



Maximal längd

2. Innan MobiBed tas i bruk

2.1 Förberedelser

Innan MobiBed börjar användas skall assistent kontrollera att batteriet är fulladdat. Se instruktioner angående laddning på sidan 8.

1. Testa inte elektriskt kontrollerade funktioner innan Punkt 2 nedan har slutförts och manualen är genomläst.
2. Ladda batteriet under 10 timmar efter anslutning av strömkabeln till vägguttaget 220-240 V.
3. Längdinställning:
 - a. Placera sittkudden på sittytan
 - b. Kontrollera att sittytans ram passar till sittkudden.
4. Gå igenom de 6 kontrollpunkter i checklistan under 2.2 på denna sida
5. MobiBed är nu klar att börja användas

2.2 Checklista

Kontrollera att:

1. bromsmekanismen där oskadad och fungerar korrekt och att bakhjulen bromsas.
2. hjulen är oskadade och korrekt monterade.
3. körhandtaget är rätt monterat och går att justera.
4. kontrollera att alla delar som är rörliga löper lätt och inte helt eller delvis är låsta.
5. batteriet är uppladdat och strömsladden är oskadad och borttagen ur vägguttaget och ihoprullad.
6. handkontrollens knappar justerar höjd, ryggstödsinkel och benstöd.

!! OBS – OBS!!

För att undvika skador orsakade av MobiBed skall assistenter innan arbetet med MobiBed påbörjas, göra sig bekant med den omgivning som skall utnyttjas. Var uppmärksam på hinder som möbler, trösklar, dörrkarmar etc., och ställen som smala passager. Se till att det finns plats runt hörn där MobiBed skall passera och att eventuellt flytta möbler som kan komma att stå i vägen. Tänk på att MobiBed är lång och kräver mycket plats, speciellt när den skall vändas helt om. Undvik att stöta emot omgivning och personer.

3. Produktbeskrivning

3.1 Ett mobilt hjälpmedel

MobiBed är ett mobilt hjälpmedel som användes till positionering av personer med funktionsnedsättning och behov av varierad ställning i vila och avlastningssituationer. MobiBed med sittkudde som underlag användes till att ge brukaren optimal komfort vare sig det handlar om sittande eller liggande ställning, ryggläge såväl som sidoläge.

3.2 Belastning och brukarvikt

MobiBed är konstruerad och testad för att kunna bära en totalvikt på 120 kg, men sittytan och sittunderlaget är normalt inte tillräckligt stort för den vikten. Den aktuella brukarvikten kan därför sällan överskrida 90 kg. Använd lift för överflyttning till och från MobiBed.



Viktig information!

Den angivna belastningsgränsen skall respekteras för att inte skada vagnen




Varning!

Hjälpmidlet är inte avsett för brukare som kan förflytta sig av egen kraft.

3.3. Mobilt hjälpmedel

MobiBed har fyra hjul med punkteringsfria däck. Framhjulen är monterade i gaffel som är svängbara i 360 ° kring en lodrätt axel, vilket gör det lätt att manövrera. Bakhjulen är fast monterade i en vågrät axel. Endast bakhjulen kan bromsas.

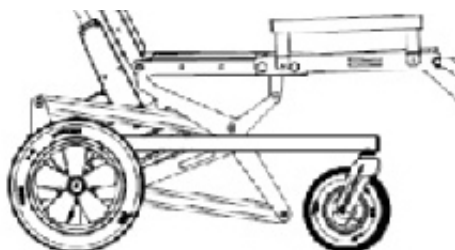

Bakhjul

Svängbara framhjul

3.4 Många möjligheter i samma hjälpmedel

MobiBed har många inställningsmöjligheter och är lätta att anpassa till enskilda brukare:

- Längdjusteras i sits och rygg och kan anpassas för barn och vuxna.
- Justeras i höjd så den anpassas till brukarens behov och/eller till assistentens arbetsställning.
- Med sittkuddar är det möjligt att skapa en sittande eller liggande ställning anpassad till var enskild brukare för att ge trygghet och stabilitet.
- Ett mobilt hjälpmedel som kan ställas in i ryggen och fotstödet från vågrätt liggande till 60 ° sittställning.
- Ett alternativ till rullstol, säng, madrass, sittsäck etc.
- Ett socialt redskap där vilosituationen inte är bundet till en speciell plats. Assistent kan flytta brukaren och ständigt vara nära när det är nödvändigt.
- Kan i begränsad omfattning användas utomhus på jämt underlag som terrass eller liknande underlag.



4. Säkerhetsinformation

4.1. Belastning



Viktig information!

MobiBed får inte lastas med brukare och hjälpmedel som tillsammans överstiger angiven maximal vikt på 120 kg. MobiBed är avsedd att användas av en brukare, placerad i sittkudde. Föreslagen maximal brukarvikt är 90 kg. Jmf. punkt 3.2 i denna manual.

4.2. Användning med lyft



Viktig information!

Det rekommenderas att lyft användes när brukaren flyttas till och från MobiBed. Vid användning av en mobil lyft skall MobiBed ställas så att lyftens stödben går fritt under alla delar i MobiBed.

Assistenten skall alltid säkerställa att brukaren är korrekt placerad i MobiBed och sittkudde.

Placera brukarens bak här!



4.3. Transport i bil



Viktig information!

Skall MobiBed tas med i bil eller liknande rekommenderas att använda lyft eller ramp vid i- och urlastning.


Brukaren får aldrig vistas i MobiBed när den flyttas in i eller transporteras i andra transportmedel. Detta gäller även om MobiBed är fast förankrad under sådan transport. MobiBed är inte krocktestad.

I övrigt hänvisas till Danska Socialstyrelsen (tidigare Hjælpemiddel Institutet): Fastspænding af kørestole i biler (2008). ISBN Nr. 87-88548-59-7.

4.4. Förankring under transport

MobiBed har 6 fästpunkter på chassiet för fastspänning till transportfordonets motsvarande punkter. Följ de generella säkerhetskrav och regler för transport av hjälpmedel i transportfordon.

Fästpunkterna på MobiBed är placerade: 1 punkt på var sida, 2 på punkter på främre delen av chassiet och 2 punkter på bakre delen av chassiet.

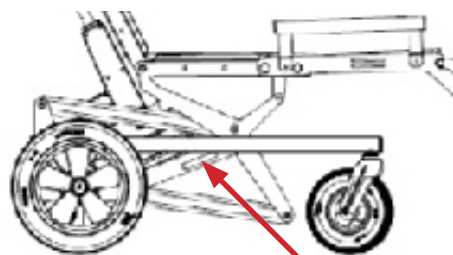

Fästpunkt på sidan!



Varning!

MobiBed får inte användas av brukare under transport i motoriserade fordon. **MobiBed är inte krocktestad.**

4.5. Sitt inte på sittytan, ramen runt sittytan eller fotstödet.



Viktig information!

Sittytan är utformad så att sittkudden/madrassen skall passa. Sittytans övre ryggdel, sitsdelen och fotstödet nedre del, har en ram för att hålla kudden/madrassen på plats. Ramen är inte avsedd att sitta på. Det är inte tillåtet att sitta på ramen eller fotstödet.

4.6. Bromsar och hjul



Viktig information!

MobiBed har bromsar på bakhjulen men inte på framhjulen. Assistenten bör därför inte luta sig emot vagnens sida trots att bromsen är aktiverad.

Bromsen manövreras enkelt med ett användarvänligt grepp på körhandtaget.

Alla fyra hjul har punkteringsfria däck.

4.7 Vi rekommenderar att använda
1 eller 2 säkerhetsbälten



Varning!

MobiBed levereras med 1 säkerhetsbälte som skall användas när MobiBed är i rörelse eller står still. Det rekommenderas till brukare som övervägande ligger stilla och inte kan förflytta sig själv.

2 säkerhetsbälten rekommenderas i MobiBed för den brukare som är mer orolig eller har ofrivilliga rörelser. De två bältena monteras då i kryss över brukaren.

MobiBed är inte avsedd för brukare som är rörliga och kan förflytta sig av egen kraft, eller sådan brukare som själv kan ta sig fri från säkerhetsbältet.

Säkerhetsbältet monteras på ramen runt sitsen, inte till chassiet.

4.8 Var extra uppmärksam på:



Viktig information!

Brukaren har ofta händer, armar, ben och fötter delvis placerade utanför MobiBed. Var uppmärksam på att brukaren inte skadar sig på förbipasserande personer eller utrustning.

Vid transport i rummet skall säkerställas att brukaren inte skadas vid passage genom trånga passager eller dörröppningar.

Lyft aldrig MobiBed från golvet genom att lyfta i fotstödet eller körhandtaget.

Var noga med att inte köra framhjulen mot kanter eller andra liknande hinder som kan skada framhjul och gaffel och i värsta fall skada hjulfästet med fara för att brukaren faller ur.

Med brukare i MobiBed bör förflyttning endast ske med sittytan i sitt lägsta läge där stabiliteten är störst och assistenten har full överblick i körriktningen.

När MobiBed inte används skall den alltid vara bromsad.

Parkera aldrig MobiBed med brukare på lutande underlag. Bromsen är inte effektiv på halt eller brant underlag.

4.9 Huvudsakligen för inomhus användning



Viktig information!

MobiBed är i huvudsak konstruerad för att användas inomhus. Dock kan den i begränsad omfattning användas utomhus på terrass eller liknande. Den är inte konstruerad för att transportera längre sträckor utomhus och inte på ojämt eller kuperat underlag. Användning i vatten oavsett om djupet är litet eller större är inte tillåtet.

4.10 Klämrisk



Viktig information!

Tillse att ingen klämrisk föreligger för personer eller föremål som finns inom eller i närheten av lyft- och rörliga inställningsfunktioner i sativet eller runt batteriet. Var uppmärksam på att INTE höja MobiBed när den i helt, eller i någon del står under en bordsyta eller motsvarande. Risk finns också för att skada på MobiBed och på brukaren genom klämning.



4.11 Kontroll av risk-orsaker



Viktig information!

Bromsen skall alltid vara aktiverad när lyft och sänkfunktion användes, när brukare när placerade i MobiBed och när arbete pågår runt MobiBed.

Lämna aldrig brukare utan uppsikt.

Under laddning av batteriet får MobiBed inte användas.

Lämna aldrig en brukare i MobiBed på lutande underlag. Glöm inte brukaren i sol, kyla, bläst eller regn.

5. Laddning av batteri och användarinfo

För den elektriska funktionen i MobiBed har vi valt att använda det senaste SMPS systemet från LINAK. Systemet är konstruerat för sjukvårdssektorn med förbättrad livslängd, slitstyrka, vattentätt, tyst och miljövänligt. Systemet består av kontrollbox med nätkabel, litiumbatteri, 3 motorer och en handbetjäning.

5.1 Funktion

Lyft/sänkfunktionen i MobiBed och vinkelinställningen av rygg- och fotstöd regleras med handkontrollens knappfunktion. Batteriet förser motorer och handkontrollen med ström till dessa funktioner.

5.2 LED indikator



CA40 har trefärgad LED indikator som anger om enheten drivs från nätet eller batteriet.

MobiBed ansluten till elnätet	
LED färg	Anvisning
Grön	Ansluten till elnätet utan att använda handkontrollen. Systemet fungerar korrekt och är klart för normal användning.
Orange	Ansluten till elnätet utan att använda handkontrollen. Systemet är defekt och får inte användas
Gul	Varning - Ansluten till elnätet och handkontrollen används. Systemet fungerar korrekt.
Gul	Varning - Ansluten till elnätet utan att använda handkontrollen. Systemet är defekt och får inte användas

Inte ansluten till elnätet för laddning	
LED färg	Anvisning för användning
Orange	Batteridrift och handkontrollen aktiverad Systemet fungerar korekt.
Blinkande LED färg	Batteridrift med handkontrollen aktiverad Enhetsen är inte ansluten till elnätet korrekt

5.3 Laddning av batteri

1. Laddtid första gång från tomt batteri eller första gången MobiBed tas i bruk 10 timmar med anslutning till 220-240 V.
2. Drifttid för ett fullt laddat batteri i god kondition kan beräknas till 5 timmar.
3. När batteriet behöver laddas ljuder ett bibljud när knapparna på handkontrollen hanteras. Batteriet skall då laddas omgående. Undvik fortsatt arbete med MobiBed innan batteriet är fullt laddat igen.
4. Det rekommenderas att ha fasta rutiner för laddningen.
5. När MobiBed är i användning skall nätsladden vara ihoprullad.
6. Batteriet kan inte överladdas. Batteriet kan därför vara anslutet till 220-240 V när MobiBed inte är i användning.
7. Om MobiBed står utan användning under längre tid skall batteriet laddas var 12:e månad för att inte självurladdas. Förvaring skall ske inomhus och i torr omgivning. Batteriet får inte utsättas för under -10°C eller över $+40^{\circ}\text{C}$. Drifttemperatur är $+5^{\circ}$ till $+30^{\circ}\text{C}$.
8. Alla LINAK produkter är konstruerade för att fungera till optimal livslängd men är mycket beroende av hur produkten användes.
9. Alla LINAK produkter skall rengöras regelbundet från damm och smuts och bör regelbundet kontrolleras för mekaniska skador förslitning. Sslitna delar skall bytas ut.



Viktig information!

Varning!

Batteriet skall omgående laddas om en aukustisk signal hörs.

Drag ur nätsladden innan MobiBed flyttas.

Kom ihåg att ladda batteriet under tid då MobiBed inte används.

6. Inställningar

- 6.1 Handkontrollen
Med handkontrollen justeras Mobi Bed.

Knappen funktioner:

Översta raden: Ryggstödslutningen


Mellersta raden: Fotstöds vinkel

Nedersta raden: Höjd över golvet

- 6.2 Höjdinställning

MobiBed är steglöst justerbar i höjd via en lyftram som är kopplad till en styrenhet, batteri och motorer. Lyft/sänkfunktion, sittytans ryggstöd och fotstöd manövreras från en handkontroll.

I ytterposition stoppas alla funktioner

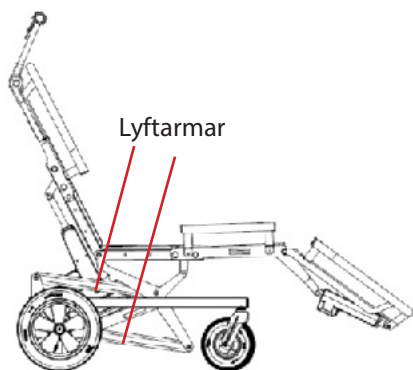

Viktig information!

MobiBed skall höjas till lämplig arbetshöjd innan den körs över hinder för att förhindra att den lyftarmen stöter emot hindret.

För transport i bil rekommenderas att ramp användes.


- 6.3 Längdjustering av MobiBed

Sits och ryggstöd, som insatskudden ligger emot, kan justeras i längd.



Sittytan och ryggstöd kan justeras i längd:

1. Tag bort kudde/madrass.
2. Under sittytan och ryggstöds sidor finns på bägge sidor en fjäderbelastad positioneringsbult för inställning av sits och ryggstöd.
3. Drag ut bultarna och vrid $\frac{1}{4}$ varv till olåst position.
4. Drag/skjut sits och ryggstöd till önskad position.
5. Vrid positioneringsbulten $\frac{1}{4}$ varv och drag/skjut sits och ryggstöd till ett "klick" hörs.

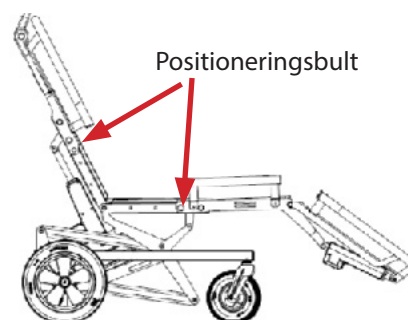


6.4 Körhandtaget

Körhandtaget som används till att manövrera MobiBed kan anpassas i höjd, dels genom sittytans höjd över golvet, som justeras med handkontrollen, dels genom att stegvis ändra vinkeln på körhandtaget. På var sida på körhandtaget finns ett grepp (kallas Knäled) som stegvis justerar höjden.



Viktig info!

Körhandtaget får inte användas som hävstång när MobBed körs över trösklar eller liknande hinder.

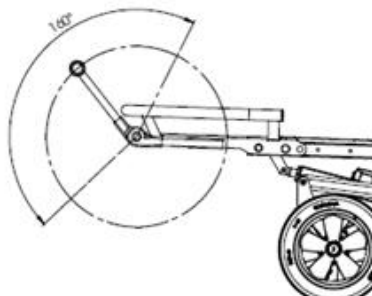

6.5 Bromsfunktion

Bromsen är kopplad till bakhjulen och endast bakhjulen bromsas. Bromshandtaget på körhandtaget har en låsfunktion som fungerar som parkeringsbroms. Bromsen aktiveras genom att klämma åt bromshandtaget varmed hjulen bromsas. För att lossa bromsen hålls den röda plastdelen inne och bromsen frikopplas.



Viktig info!

MobiBed bromsas endast på bakhjulen. Personer får därför inte luta sig emot MobiBed även om bromsen är aktiverad.



6.6 Justering av bromsen

Bromsen justeras på bromshuset genom att vrida justerskruven. Följ med handen bromskabeln ned till justerskruven.

Vrids skruven medurs minskas bromskarften. Vrids skruven moturs ökas bromskraften. Kontrollera att bromskabeln inte sitter i kläm utan löper fritt hela vägen från bromshandtaget till bromshuset.



Bromshuset är placerat under ryggdelen



7. Insatskuddar och positioneringskuddar

- 7.1 Modul insatskudde används på stativet i olika storlek och modeller. Insatskudden är tillverkad i följligt material och avtagbart ytterfodral som kan tvättas. Insatskudden är tillverkad i vatten- och bakterieavvisande polyester.



Modul Insatskudde är uppbyggd av 3 delar som kan kopplas samman till en sittkudde. Delarna är formbara och anpassar sig efter brukaren och underlaget. För brukare med Scolios eller andra svåra deformationer ger detta goda möjligheter att skapa stöd och komfort i sittande eller liggande ställning.



Ryggmodulen är uppbyggd av 2 separata kuddar. Modul A (den minsta) har fastare fyllning för att ge stöd åt huvud och nacke. Modul B har mindre fyllning som gör den mer flexibel för att forma sig efter brukarens kroppsform.

Då sittytan inte har några sidogrindar skall säkerhetsbälte alltid användas då brukare finns i MobiBed.



Insatskudden kan med fördel formas innan brukaren placeras så att brukaren kommer djupt ned i kudden för att ge bästa stöd.



Brukaren kan placeras antingen i rygg- eller sidoläge. Det rekommenderas att alltid använda lyft vid förflyttning till och från MobiBed.



Exempel på plant rygggläge med TUMLE® halvmånekudde som stöd för armen. Modul Insatskudde formar sig efter personen som får stöd för kroppen, ben och fötter.



Exempel på sidoläge. Här användes TUMLE® positioneringskuddar för stöd av huvudet, armen och benet.

7.2 Madrass och positioneringskuddar

Madrassen består av en Tempreflex Visco Elastisk skummadrass, där "boet" byggs upp med lösa positioneringskuddar. Det finns stora möjligheter att forma en individuell positionering för enstaka brukare. Samma kuddar kan desutom användas för positionering i säng.

Tempreflex madrassen finns i 3 storlekar och är försedd med ett vattenavvisande och bakteriefrånstötande polyesteröverdrag.



Överdraget har stroppar i sin övre del mot ryggstödet för positioneringskuddar. Med hjälp av dessa stroppar och säkerhetsbältet hålls både brukare och kuddar på plats i önskad ställning.



Beroende på vilken ställning som önskas och vad som passar brukaren som stöd, placeras kuddar på madrassen så att ett "bo" skapas.



MobiBed's kuddar kan med fördel kombineras med TUMLE® kuddar och på så sätt ge goda möjligheter för individuell positionering.

MobiBed positioneringskuddar är en serie kuddar anpassade för att användas med MobiBed men kan också användas i andra situationer. Kuddarna är fyllda med EPS kulor i ett polyesteröverdrag som är vattenavvisande och antibakteriellt. Ett avtagbart överdrag som kan tvättas finns vid behov.



Kilkudde



Nackkudde



Gouda kilkudde



Trekantkudde

7.3 Montering av säkerhetsbälte

MobiBed har inga sidogrindar och därför rekommenderas att alltid använda säkerhetsbälte när en brukare vistas i MobiBed.

Används 1 eller 2 bälten beroende på brukarens rörelseförmåga. Placeras antingen över höften vid 1 bälte eller i kryss vid 2 bälten.

Säkerhetsbältet läggs över höften på brukaren och fästes som visas nedan.



Säkerhetsbältet fästes runt ryggstödet böjda rör, under sittytan ram eller genom spåren under sittdelen

8. Underhåll

8.1 Rengöring av vagnen

Stativet rengöres med trasa och vatten och vid behov med tillsats av diskmedel eller liknande. Rengöringen genomförs vid högsta höjd inställd över golvet med ryggstödet vinklat 45 ° och fotstödet vinklat 20 ° för att alla ytor blir lätt tillgängliga. Bromsen skall vara aktiverad under rengöringen.

Om hjul och hjulfästen har smutsats skall de rengöras omgående.

Undvik att använda MobiBed i regnväder. Skulle det ske skall MobiBed torkas av så snart möjligt.

Tillse att obehörig person inte befinner sig i eller intill MobBed under rengöring. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller liknande på MobiBed.

8.2 Rengöring av kuddar

Insatskudden utan överdrag är tillverkad i 100% PU belagd och flamsäker polyester. Rengöres med trasa och vatten och vid behov tillsats av lite diskmedel eller liknande. Sprit kan användas.

Överdraget finns i 2 versioner:

Grå single jersey:
Biobaserat (cellulosa) bi-elastiskt, vattenavvisande hudvänlig, ÖKO TEX certifierat och brandhämmande. Tvättas vid 60 ° C.

Svart Spacer: 100% polyester, ÖKO TEX certifierat och brandhämmande. Tvättas vid 60 ° C. Båda överdragen har undersida i antihalk.

8.3 Desinfektion

För desinfektion av stativet, andra metalldelar och insatskudden torkas med sprit 75-80%.

8.4 Smörjning

MobiBed behöver ej smörjas

8.5 Efterspänning av bultförband

Det rekommenderas att bultar för framhjul och framgaffel kontrolleras regelbundet. Efterspänn endast om bultar visar tecken på att ha lossat.

8.6 Reparation

Vid reparation av stativet gäller generella säkerhetsföreskrifter och därutöver:

Vid byte av förslitningsdelar och /eller av andra reservdelar skall leverantören kontaktas. Delar skall beställas från leverantörens reservdelslista (se sidan 15).

Kontakta alltid leverantören vid större omfattande reparation.

8.7 Årlig översyn

MobiBed skall genomgå årlig översyn av auktoriserad person, varvid kontroll av stativets funktioner för elektronik, motorer och underhåll som efterspänning av bultar och justering av bromsfunktion.

8.8 Rätt till reklamation

URIFORM AB följer Köplagen avseende reklamation. Denna rätt gäller endast om original reservdelar och tillbehör använts och auktoriserad servicetekniker utfört service eller specialanpassningar på MobiBed.

URIFORM AB tar inte ansvar för skador på MobiBed eller på brukaren som uppstått efter/genom:

- Transport
- Oaktsam hantering
- Normalt slitage
- Felaktig användning
- Felaktiga reservdelar och tillbehör
- Service och anpassning av icke auktoriserad servicetekniker

9. Felsökning

Lyft/sänkfunktionen eller ryggstödslutningen fungerar inte:

Är batteriet laddat?

Finns något som sitter i kläm- om så, avlägsna det.

Är handkontrollen synligt skadad? -om ja, byt handkontroll.

Sitter alla kontakter korrekt placerade i kontrollboxen? Om nej, sätt dem rätt.

Om inget av ovanstående tar bort felet skall leverantören kontaktas.

Bromsen fungerar inte:

Finns skador på bromskablarna? Om Ja kan det vara nödvändigt att justera bromsen enligt anvisningar på sidan 12.

Om inget av ovan hjälper skall leverantören kontaktas.

Framhjulen svänger inte runt:

Är hjulfästet i stativet löst eller skadat? Om nej, sitter något i kläm, ta bort det.

Om inget av ovan hjälper skall leverantören kontaktas.

Bakhjulen rullar tungt eller är låsta:


Är bromsen aktiverad? Om nej kan det vara nödvändigt att justera bromskabeln. Se anvisningar på sidan 10.

Är alla delar oskadade? Om inte, skall skadade eller slitna delar bytas ut.

Om inget av ovanstående hjälper skall leverantören kontaktas.


10. Reservdelslista

Pos.Nr.	Best.nr.	MobiBed stativ	Antal
2	163020	Akuator Linak LA40 för lyft, ryggstöd och fotstöd	3 st
3	163000	Kontrollbox Linak CA40 inklusive nätkabel	1 st
-	163001	Extra nätkabel	1 st
-	163002	Lithium batteri	1 st
11	163044	Gummigrepp för körhandtaget	2 st
17	163030	Framhjul diameter 200 mm exklusive gaffel och lager	2 st
18	163031	Hjulgaffel till framhjul med lager (vänster/höger)	2 st
16	163040 (hö) 163041 (vä)	Bakhjul diameter 300 mm med trumbroms	2 st
22	163050	Laminatplatta för ryggstöd	1 st
22	163052	Laminatplatta för benstöd/fotstöd	1 st
27	163051	Laminatplatta för sitsen	1 st
35	163045	Knäled för justering av körhandtaget - höger	1 st
35	160346	Knäled för justering av körhandtag - vänster	1 st
34	163042	Bromshandtag	1 st
ingen bild	163010	Handkontroll Linak HB83 3-vägs	1 st

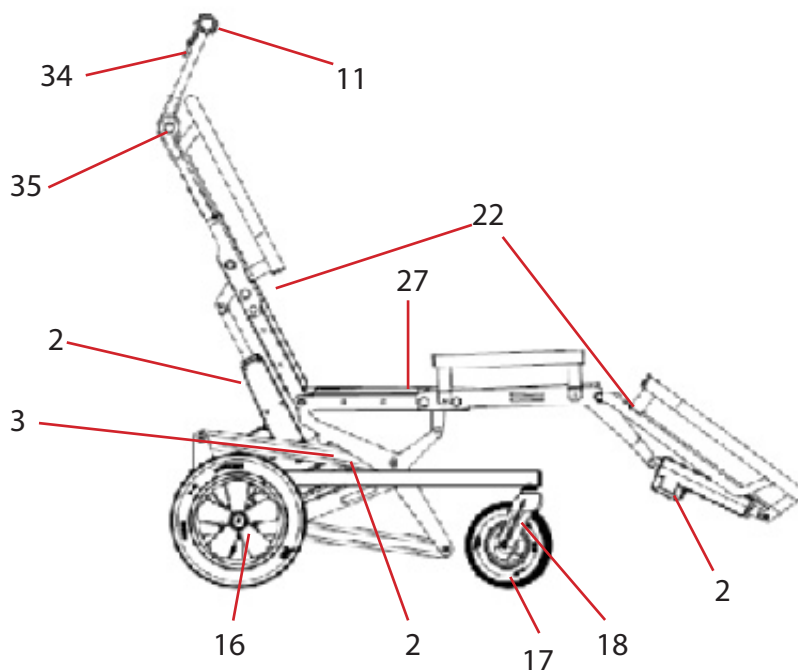

11. Specifikationer

Max längd med körhandtag och fotstöd fullt utdraget	2150 mm
Max bredd på stativet mätt över sittytans största bredd	720 mm
Sittytans höjd över golv Lägsta höjd Högsta höjd	500 mm 735 mm
Sittytans längd (justerbart) Minsta längd Max längd	1460 mm 1830 mm
Max längd vid liggande fullt utdragen: med Madrass (max längd brukaren 172 cm) med Modul Insatskudde (max längd brukaren 180 cm)	1835 mm 1930 mm
Hjulavstånd mellan fram- och bakhjul mätt vid axelcentrum	720 mm
Totalvikt utan Insatskuddar eller madrass	55 kg
Kapacitet Säkerhetstestad för	120 kg
Max brukarvikt	90 kg
Framhjul diameter	200 mm
Bakhjul diameter	300 mm
Akuator lift, ryggstöd, fotstöd – LINAK LA40-100 24V	Load 4000 N
Kontrollbox - LINAK CA40 - SMPS - IPX6	24 V
Laddare inbyggd i kontrollboxen, anslut till	100V/240V
Handkontroll - LINAK HB83 3-vägs	
<i>Minsta mått efter nedpackning för transport: Vagnen är sänkt till lägsta höjd och isärtagen. Ryggen är vinklad maximalt, fotstödet i sin lägsta position och körhandtaget är skjutet så långt framåt som möjligt.</i>	<i>Längd 1340 mm Bredd 720 mm Höjd 1070 mm</i>

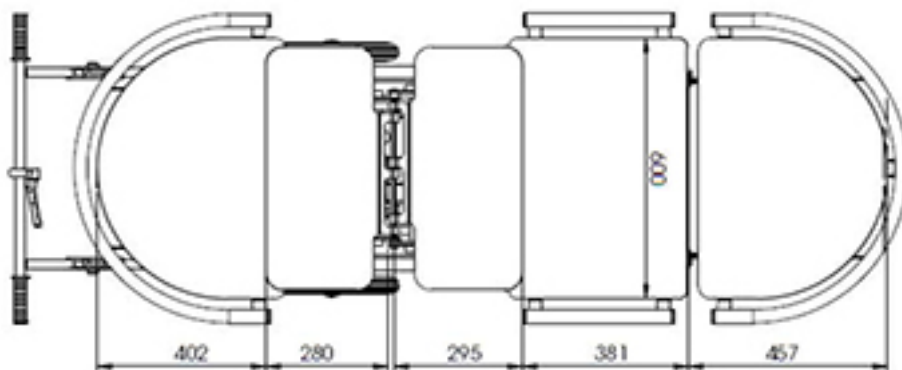

Design och tillverkning:

LASAL A/S

Industrivej 15

DK-8881 Thorsø

Danmark

CVR: DK 1437 8677

Tel: +45 86966666

E-mail: info@lasal.dk

www.lasal.dk

URIFORM



Rätt till produktförändringar utan föregående avisering förbehålles.
© URI-FORM AB 2018-1

URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck
Tel: 08-7029774, Fax 08-6402957, e-post: order@uriform.se
www.tumle.uriform.se