



COBI REHAB®
The Positioning Company

Kelvin rullstol

En unik rullstol för unika situationer

Används med framgång för..

Max 125 kg

Bruksanvisning

- Smärtpatienter
- Rörelsehindrade
- Hjärnskadade
- Neurologiska patienter
- Sclerose patienter
- Patienter med förlamning
- Patienter med skelettcancer
- Brukare med ofrivilliga rörelser som Parkinson och Huntington.
- Demens



Varning

Denna produkt får inte användas utan noggrann instruktion från utbildad personal.

Om produkten används för personer som väger mer än maximal användarvikt finns risk för skada på produkten.

Cobi Rehab påtar sig inget ansvar för skada på produkten eller personskador som orsakats av felaktig installation, felaktig montering eller felaktig användning av denna produkt.

Om delar är skadade eller saknas kontakt Cobi Rehab genast. Använd INTE ersättningsdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för fel eller olyckor som uppstår efter reparationer utan Cobi Rehabs skriftliga tillstånd.

 För att säkerställa korrekt användning av Kelvin rullstol, läs användarhandboken noggrant före användning. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt varningsetiketterna märkta med.

Dessutom får stolen endast betjänas av utbildad personal eller av personer som har fått instruktioner före användningen, då risk för att brukaren skadas annars föreligger.

Användning

Kelvin rullstol kan med fördel användas av vuxna som är allvarligt hemmade i hemmet, i hemvården, inom institutioner och hospices,

Konstruktion

Kelvin rullstol är uppbyggd av kuddar fyllda med latex och polystyren kulor. Justeringsalternativ i höft, knä och fotled, kombinerat med stolens 45-lutning, gör det enkelt att anpassa stolen till individens behov, trots deformiteter, kontrakturer och smärta, för att uppnå optimalt stöd från "topp till tå". Rullstolen är utrustad med flexarm, vilket gör att användarens armar och händer stöds som skapar trygghet, lugn och hög grad av komfort.

Ökad livskvalitet

När brukaren för första gången provar Kelvin rullstol är det lämpligt att ta med brukaren runt i hemmet eller på institutionen. Kelvin rullstol erbjuder på så sätt, redan första gången den provas, större flexibilitet och möjligheter till öka livskvalitet, och sociala relationer.

Flexibelt modulsystem

Det kompletta Kelvin-systemet består av moduler, där alla komponenter är samordnade för att passa ihop utan att störa sömnen. Till sitsen, med det integrerade underbensstödet, kan fästas ytterligare moduler.

Dessutom är det möjligt att välja en abduktionskudde, Swing-Away fotstöd, höjdregerbara armstöd och bord, samt flera storlekar och typer av nackstöd. Utbudet av tillbehör kan monteras och anpassas till den enskilda brukaren utan svårighet allt efter behov.

Återanvändningsgraden av Kelvin rullstol är hög då stolens breda utbud av tillbehör och flexibilitet, gör det enkelt att anpassa stolen för en annan brukare. Detta kan göras i samarbete med Cobi Rehabs erfarna konsulter.

 Används produkten av personer som väger mer än 125 kg är risk för att rullstolen tippar över och/eller skadads.

Brukarvikt max.	125 kg
Vikt	Ca. 47 kg
Sitslutning "tilt"	0 - 45°
Nackstöd	Ja, flera typer
Fotstöd	Ja, flera typer
Hjälpmotor kan eftermonteras	Ja
Inställbara körhandtag	Ja
Inställbar i höft, knä och fotled	Ja
Andnings- och tvättbart överdrag	Ja
Stativ	Lackerad aluminium
Hjul	Massiva
Kuddvar material	PU
Fyllnad kuddar	Latex og polystyren kulor

Säkerhetsvägledning

 Personalen måste avgöra om användaren ska spännas fast av säkerhetsskäl innan transport i stolen i eller utanför huset.

 Brukaren skall alltid lyftas i- och ur Kelvin stolen.

 Varken brukare eller personal får sitta eller stå på fotstödet.

 Manövrera tilt-inställningen av sitsen med försiktighet så att ryck kan undvikas.

 Kelvin rullstol är konstruerad för brukare som väger maximalt 125 kg.

Före användning

De skruvar som måste lossas för att kunna ställa in Kelvin stolen innan den tas i bruk sitter dolda (utom 4 och 8). Finn skruvarna under dragkedjan på positioner som tabellen visar.

Kontrollera följande:

- Att alla skruvar och bultar är ordentligt dragna efter inställningen av stolen.
- Att rullstolen löpande kan tippas och stoppas i alla ställningar och vinklar.
- Att bromsen fungerar.

1. Handbroms
2. Beslag för justering av höftvinkel.
3. Beslag för justering av knäinkel.
4. Beslag för justering av fot/vristvinkel.
5. Beslag för justering av benlängden.
6. Nackstöd
7. Flex Arm
8. Beslag för justering av körhandtagets höjd.




Scanna koden för mer produktinformation





- 8. Beslag för justering av körhantagets höjd.
- 9. Beslag för justering av körhantagets vinkel.
- 10. Manövrering av tilt funktionen.
- 11. Skruvar för justering av höftvinkel.
- 12. Fäste för nackstöd.
- 13. Tippskydd.
- 14. Fotbroms.

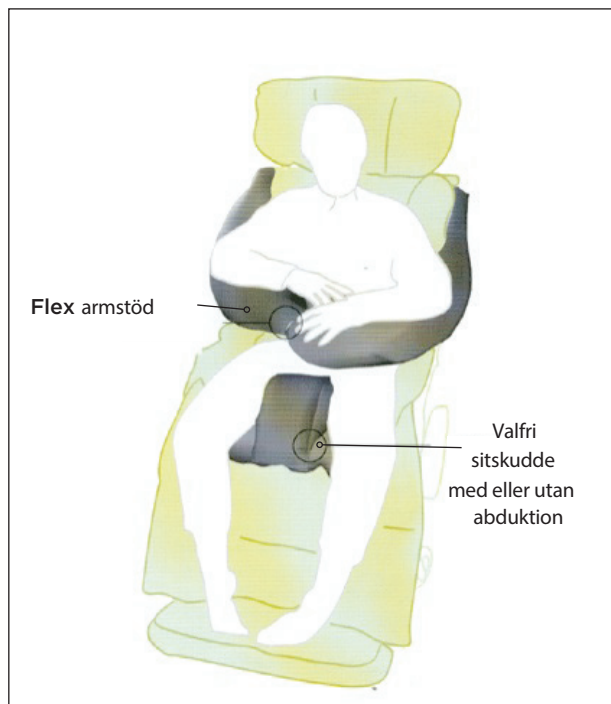

Justermöjligheter



Inställningar

Vid alla inställningar av stolen, är det viktigt att bara lossa de skruvar som skall användas, då det annars inte är möjligt att göra inställningen ensam.

Huvudstödet

Huvudstödet går att ställa in både i djup och vinkel. Håll nackstödet med en hand och lossa de nödvändiga skruvarna med den andra. Ställ in nackstöd, håll det fast och drag åt skruvarna med den andra handen.

Höjjustering av huvudstödet

Nackstödet höjd kan ställas in genom att hålla nackstödet med en hand och lossa skruven med den andra. Höj eller sänk nackstöd till önskat läge och drag åt skruven.

Edison nackstöd

För Kelvin-stolen finns ett Edison nackstöd, som är lätt att justera med det multifunktionella beslaget. Nackstödet kan justeras i vertikala, laterala och framtåtriktade positioner.

Höftvinkel

När höftvinkeln skall justeras skall skruvar på fler punkter lossas:

1. Lossa de två skruvarna på stolens baksida märkta som nummer 11 på bilden på sid 4.
2. Lossa sedan skruvarna märkta med nummer 2 på bilden på sidan 3. Kom ihåg att lossa på både vänster och höger sida.

Räta upp stolen genom att trycka mot markering 2 på bilden sidan 3. Genom att dra uppåt vid markering 2 på bilden sidan 3 öppnas vinkeln i höften.

⚠ Se till att sitsen inte krockar med det tvärgående staget under sitsen när brukaren lyfts på platys i stolen.

⚠ Kom ihåg!

- att dra åt skruvarna på bägge sidor efter avslutad inställning.

Knä vinkel

Knä vinkeln kan justeras genom att lossa skruvarna på båda sidor som motsvarar märket nr 3 på sidan 3. Håll fotstödet med en hand och drag upp det eller tryck ner till önskad knä vinkel. Dra åt skruvarna, medan den andra handen håller fotstödet på plats.

Fotstödet justering

Fotstödet kan förlängas genom att lossa skruvarna som motsvarar märket nr 5 på sidan 3 (4 skruvar totalt). Lossa alla 4 skruvar, drag i fotstöd till önskad position och drag åt skruvarna igen.

Fotstöds-/ankelvinkel

Fotstödet kan justeras genom att lossa skruvarna motsvarande märket 5 på ritningssidan 3 (4 skruvar totalt). Lossa alla 4 skruvar, justera efter behov och dra åt skruvarna igen.

Körhandtag

Höjden på körhandtaget kan ställas in genom att lossa handvredet nr 5 på sidan 3 och därefter lossa skruvarna tills det är möjligt att justera körhandtaget. Samtidigt är det möjligt att ställa in vinkeln för optimalt grepp. Se märkning nr 8 och nr 9 på sidan 4. Drag åt skruvarna igen och se till att spåren passar ihop.

Manövrering av tilt-funktionen

När brukaren skall lutas tillbaka aktiveras lutningsfunktionen genom att trycka på handtaget med märke nr 10 på sidan 4.

Brukarens vikt bidrar till att sänka stolen. Handtaget skall aktiveras även när brukaren skall tippas tillbaka från viloläge.

Justering av kuddarnas fyllning

Alla kuddar i rullstolen kan öppnas och antingen fyllas på med mer Kelvin-fyllning eller tömmas på fyllning.

Kuddarna öppnas med den gula dragkedjan. Var försiktig eftersom fyllningen lätt sprider sig. Det är en bra idé att göra en tratt av papper, som hjälp att hålla på fyllning.

⚠ När fyllningen tas ur kudden måste man vara medveten om att inte ta bort så mycket så att användaren sitter eller ligger "igenom" kudden.

Underhåll och rengöring

Stolen

Kelvin rullstol är avsedd för inomhusbruk, men kan även användas utomhus. Skulle Kelvin rullstol bli våt, skall den torkas av med en torr trasa så snart som möjligt.

Om underredet är smutsig, torka av med en trasa fuktad i mild tvållösning.

⚠ Det rekommenderas att stolen torkas / dammsugas minst en gång i veckan och hjulen hålls rena från smuts.

Kelvin rullstol levereras med skydd på nackstöd, sätet Flex-armarna. Dessa bomullsöverdrag kan tvättas vid 60 ° C, men får inte torktumlas.

I allmän daglig användning är det sällan nödvändigt att tvätta kuddarna, men tag för vana att torka kuddarna med en trasa som är nedsänkt i mild tvållösning en gång per dag.

Kuddarna

Kuddarna kan tas bort genom att använda den svarta dragkedjan. Kuddarna spritas av med ytdesinfektion vid rengöring. Yttertyget kan tvättas i maskin på 40 grader, men då måste först innehålllet tas ut ur kudden.


Överdragen

Överdagen kan tas av och maskintvättas vid 60° C.



Kuddnummer

⚠ Får inte torktumlas

⚠ Överdagen skall vara helt torra innan de återmonteras på kudden efter tvätt.

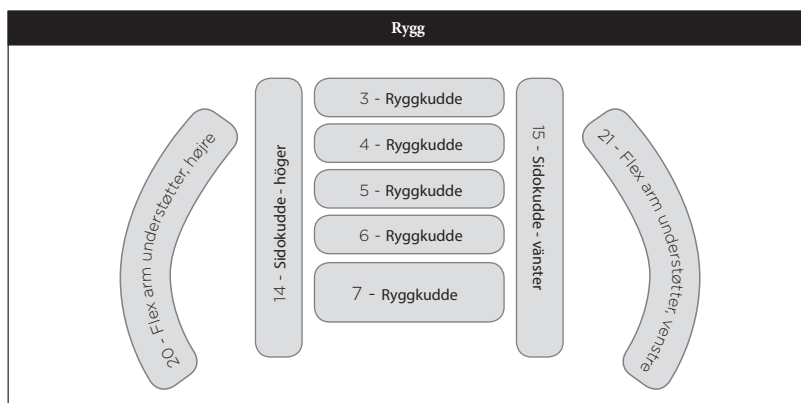

Kuddnr.	Produktbeskrivning
1	Kelvin Huvudstöd
2	Ryggstödsförläggning
3 - 8	Ryggkuddar
10	Platt sitskudde
11	Sitskudde med abduktionskloss
12 - 13	Ben/underbenskudde
14 - 15	Sido kuddar
16 - 17	Lår sidokuddar
18 - 19	Underbens sidokuddar
20 - 21	Flex Arm understöd
22	Fot understöds kudde
23 - 24	Hårda armstöd med kuddar
28 - 29	Benstöd sida
30 - 31	Benstöd kudde, posterior
32 - 33	Fot kudde

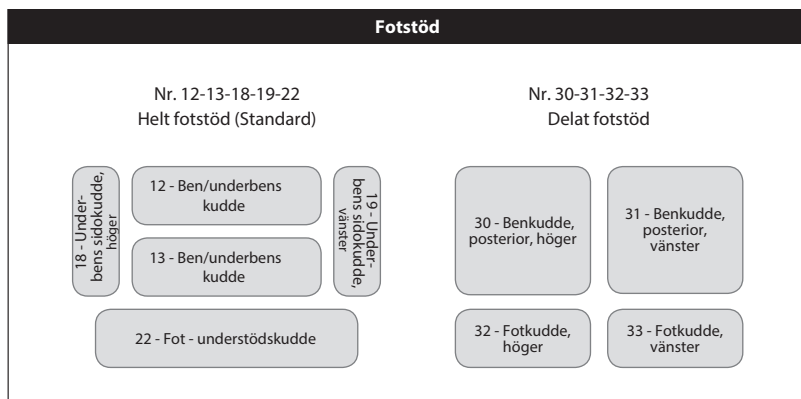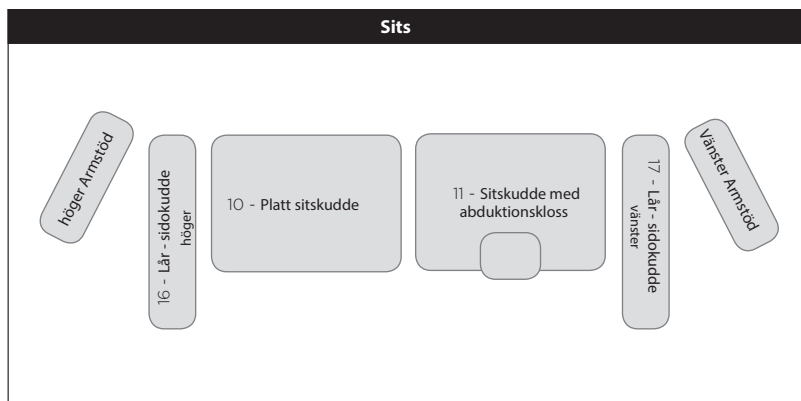

Mått och specifikationer

Storlek	sits- bredd cm	Sits- djup cm	Rygg- höjd cm	Brukar- vikt
Kelvin 1 S40	34-40	40-48	55	125 kg
Kelvin 1 S48	34-40	48-56	55	125 kg
Kelvin 2 M40	40-46	40-48	55	125 kg
Kelvin 2 M48	40-46	48-56	55	125 kg
Kelvin 2 M56	40-46	56-64	55	125 kg
Kelvin 3 L48	46-52	48-56	55	125 kg
Kelvin 3 L56	46-52	56-64	55	125 kg

Garanti

Stolen levereras utan fel och med alla komponenter komplett. Ett års garanti lämnas för produktionsfel och / eller defekt i material.

Ett års garanti lämnas för produktionsfel och / eller defekter i materialet på överdrag ,sits-, ben- och ryggkuddar, hjul, cylinderlås, kablar, handtag, beslag och fotstöd.

Eventuell reparation får endast utföras av personer som är auktoriserade av Cobi Rehab ApS. Om reparationer görs av någon person inte auktoriserad av Cobi Rehab ApS, upphör garantin att gälla.

Oavsett fel, kontakta först Cobi Rehab ApS . Sänd inte tillbaks stolen till återförsäljaren utan att först kontaktat en konsult för återförsäljaren.

Garantin gäller ej om/för:

- stolen är misshandlad eller varit ute för en olycka.
- stolen reparerats av annan person än auktoriserad av Cobi Rehab ApS.
- slitage efter normal bruk
- brukarmanualens anvisningar inte följts



Life & Mobility
Logistiekweg 7
NL-7007 CJ Doetinchem
Holland

Postbus 304
NL-7000 AH Doetinchem
Holland

ÅTERFÖRSÄLJARE

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

11/2018/JP



COBI REHAB[®]

The Positioning Company

COBI REHAB

Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark

Tlf. +45 7025 2522

www.cobirehab.com